





TERMINALE DI CAMERA CON TASTI

TERMINALE DI CAMERA CON DISPLAY

TERMINALE DI PRESIDIO

TERMINALE DI CAMERA CON DISPLAY + MODULO AUDIO

# INDICE

<b>PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI</b>	<b>2</b>
<b>PRIORITÀ CHIAMATE</b>	<b>7</b>
<b>EVENTI BASE</b>	<b>9</b>
01 Presenza infermiera	10
02 Chiamata dal letto paziente	11
03 Chiamata dal bagno	12
04 Allarme biomedico	13
<b>EVENTI EVOLUTI</b>	<b>14</b>
05 Presenza infermiera + emergenza	14
06 Presenza infermiera + allarme medico	15
07 Chiamata dal letto paziente + emergenza	16
08 Chiamata dal letto paziente + allarme medico	17
09 Chiamata dal bagno + emergenza	18
10 Chiamata dal bagno + allarme medico	19
11 Allarme biomedico + emergenza	20
12 Allarme biomedico + allarme medico	21
13 Sistema antifuga - uscita paziente da accesso controllato	22
14 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di chiamata da altra camera	23
15 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di chiamata da altro bagno	24
16 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di chiamata da biomedico da altra camera	25
17 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di chiamata di emergenza con presenza infermiera da altra camera	26
18 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di chiamata di emergenza da bagno in altra camera	27
19 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di allarme medico in altra camera	28
20 Segnalazioni sui terminali di camera a seguito di allarme medico in altro bagno	29
<b>COMUNICAZIONE AUDIO</b>	<b>30</b>
Comunicazioni dalla centrale di presidio principale e secondaria	31
Segnalazioni sul display	31
Comunicazioni dai terminali di camera	32
<b>ESEMPIO 01</b> Comunicazione da centrale di presidio alla camera con presenza infermiera	33
<b>ESEMPIO 02</b> Comunicazione generale dalla camera	34
<b>ESEMPIO 03</b> Comunicazione generale dalla centrale di presidio	35
<b>ESEMPIO 04</b> Comunicazione dalla prima camera in presenza alla seconda camera in presenza	36
<b>UNIONE E SEPARAZIONE DEI REPARTI</b>	<b>37</b>
Unione e separazione dei reparti	38
<b>ESEMPIO 01</b> Unione reparti dal terminale reparto "A" del solo reparto "B"	39
<b>ESEMPIO 02</b> Unione reparti dal terminale reparto "A" dei reparti "B" e "C"	41
<b>ESEMPIO 03</b> Unione reparti dal terminale reparto "A" o "B" o "C"	43
Esempi	45
Separazione reparti	46
<b>SEGNALAZIONE GUASTI</b>	<b>47</b>
<b>QUICK GUIDE</b>	<b>49</b>

Il sistema di chiamata BTicino ti permette di gestire le chiamate in arrivo, di comunicare con il paziente, di richiedere l'intervento di altro personale infermieristico ed altro ancora.

Di seguito verranno illustrati i principali dispositivi che compongono il sistema.

## TERMINALE DI PRESIDIO PRINCIPALE E SECONDARIO




### Legenda

1. Pulsanti di navigazione;
2. Pulsante di tacitazione o di conferma;
3. Segnalazione colore giallo, anomalia impianto;
4. Segnalazione colore verde, presenza infermiera nella camera indicata;
5. Segnalazione colore rosso, richiesta di assistenza;
6. Segnalazione colore bianco, chiamata bagno;
7. Display.

### INDICAZIONI SUL DISPLAY





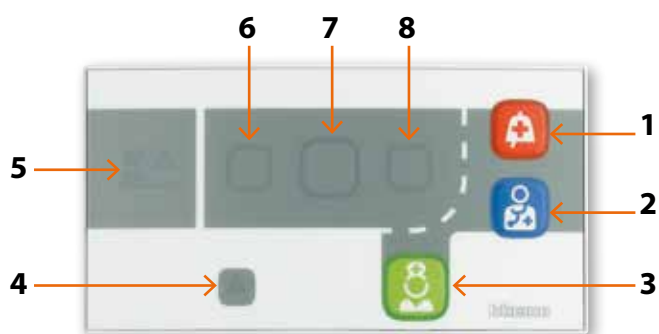




































## TERMINALE DI CAMERA CON TASTI




## Legenda

1. Pulsante/segnale di chiamata;
2. Pulsante/segnale richiesta medico;
3. Pulsante/segnale presenza infermiera e chiusura chiamata;
4. Segnalazione colore giallo, anomalia impianto;
5. Segnalazione colore rosso, chiamata da un'altra camera;
6. Segnalazione colore bianco, chiamata bagno;
7. Segnalazione colore rosso, richiesta di assistenza;
8. Segnalazione colore verde, presenza infermiera.

## INDICAZIONI SUL DISPOSITIVO

	Presenza infermiera 		Allarme letto / biomedico + presenza infermiera con chiamata medico   + 
	 Chiamata da pulsantiera letto		 Chiamata bagno da tirante bagno
	Segnalazione presenza infermiera a seguito allarme (letto - biomedico - allarme medico) 		 Chiamata emergenza bagno 
	 Presenza infermiera + chiamata emergenza  + 		Chiamata bagno tacitata con presenza infermiera 
	 Presenza infermiera + allarme medico  + 	 Il terminale di camera quando è in stato di <b>"presenza infermiera"</b> diventa <b>"monitor"</b> e visualizza anche informazioni di chiamata di altre camere	
	 Allarme biomedico		
	Allarme biomedico / letto tacitato con presenza infermiera 		 Chiamata emergenza o biomedico da altra camera
	 Allarme + presenza infermiera con chiamata emergenza  + 		 Chiamata allarme medico da altra camera 

**TERMINALE DI CAMERA CON DISPLAY**

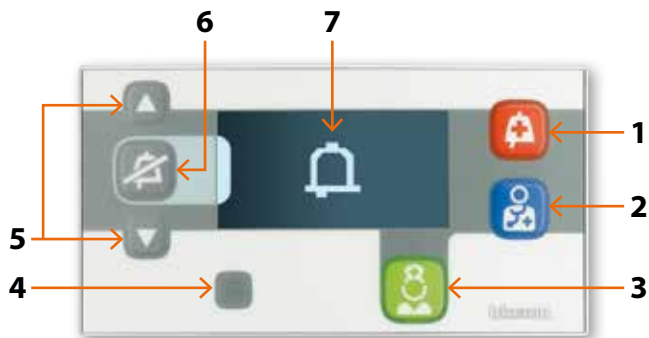


**Legenda**

- 1. Pulsante/segnale di chiamata;
- 2. Pulsante/segnale richiesta medico;
- 3. Pulsante/segnale presenza infermiera e chiusura chiamata;
- 4. Segnalazione colore giallo, anomalia impianto;
- 5. Pulsanti di navigazione;
- 6. Pulsante di tacitazione;
- 7. Display.

**INDICAZIONI SUL DISPOSITIVO**

	Presenza infermiera		Chiamata da bagno
	Chiamata da pulsantiera letto		Chiamata da bagno tacitata con presenza infermiera
	Tacitazione da centrale di presidio della CAMERA 1		Chiamata da bagno + presenza infermiera con allarme medico
	Chiamata da pulsantiera letto con presenza infermiera (tacitazione)		Chiamata da bagno + presenza infermiera con chiamata emergenza
	Presenza infermiera + allarme emergenza		oppure Chiamata da bagno + presenza infermiera con allarmi (letto o biomedico)
	Presenza infermiera + chiamata allarme medico		Chiamata bagno da altra camera con chiamata emergenza
	Allarme biomedico		Presenza infermiera nell'altra camera
	Allarme biomedico tacitato con presenza infermiera		Allarme biomedico da altra camera
	Presenza infermiera + allarme emergenza		Allarme medico da altra camera

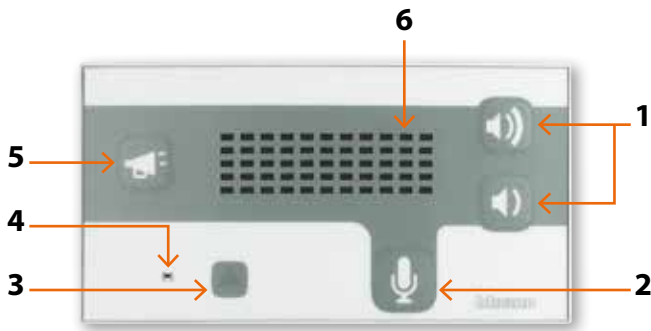**MODULO AUDIO OPZIONALE****Legenda**

1. Pulsanti di regolazione del volume (max. e min.);
2. Pulsante di comunicazione con singola camera;
3. Segnalazione colore giallo, anomalia impianto;
4. Microfono;
5. Pulsante di comunicazione per chiamata generale;
6. Altoparlante.



**NOTA:** La chiamata generale dal modulo audio della centrale di presidio viene inviata a tutte le camere appartenenti allo stesso reparto (es. medicina). Qualora la centrale di presidio ha associato altri reparti la chiamata viene inviata a tutte le camere appartenenti alle reparti associati.

**DISPLAY**

## SEGNALAZIONI SUL DISPLAY




Presenza infermiera nella CAMERA 001 del REPARTO A


N° reparto | N° camera | N° di letto / Tipo di chiamata



Chiamata da CAMERA 1 - LETTO 1

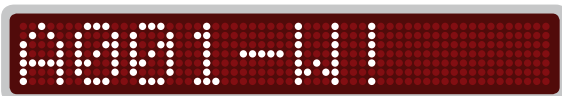

Chiamata bagno

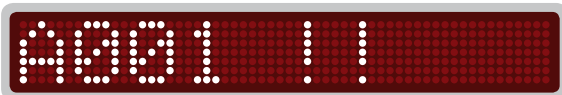

Chiamata di emergenza o biomedico



Chiamata di emergenza bagno



Chiamata di allarme medico camera



Chiamata bagno + allarme

N° porta



Uscita paziente PORTA 1 (sistema antifuga)



Guasto terminale camera (in sequenza sino a 4)




Guasto terminale camera (superiore a 4 terminali)

## PULSANTIERA PAZIENTE

Consente la chiamata di un'infermiera tramite il terminale di camera. Connessione magnetica tra la pulsantiera e la presa: possibilità di espulsione in tutte le direzioni con il connettore progettato per evitare il deterioramento del materiale.

*PULSANTIERA PAZIENTE 3 PULSANTI (CHIAMATA E COMANDI LUCE)*

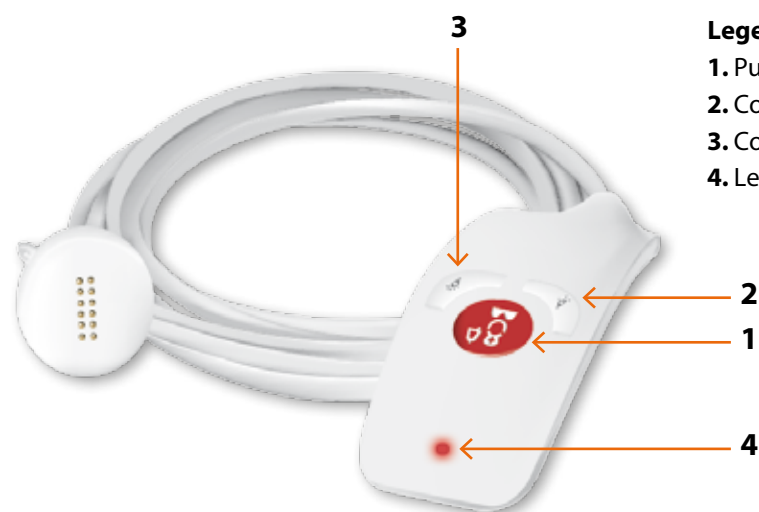


### Legenda

1. Pulsante di chiamata infermiera retroilluminato a LED;
2. Comando illuminazione lettura;
3. Comando illuminazione ambiente;
4. Led rosso segnalazione chiamata attivata.

---

## LAMPADA DI SEGNALAZIONE FUORIPORTA

Queste lampade segnalano gli eventi e lo stato della camera. In base al colore segnalano se la chiamata è stata fatta dalla camera o dal bagno e l'eventuale presenza dell'infermiera.

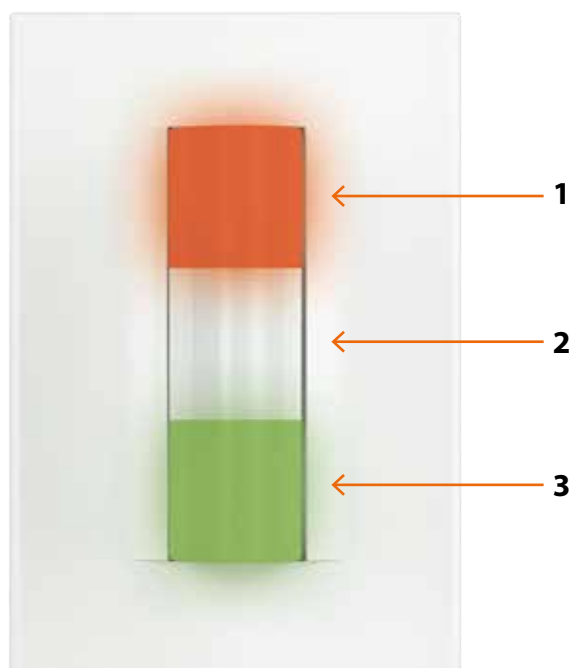

### Legenda


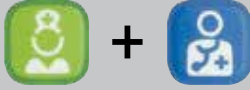



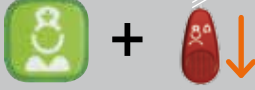



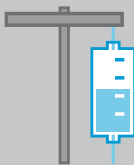










1. Spia segnalazione chiamata infermiera;
2. Spia segnalazione chiamata dai bagni;
3. Spia segnalazione presenza infermiera in camera.



# PRIORITÀ CHIAMATE



**DEFINIZIONI PRIORITÀ DELLE CHIAMATE**

	PRIORITÀ	COMANDI	SEGNALAZIONI
<p><b>CHIAMATA DI ALLARME MEDICO</b> Richiesta aiuto medico</p>		  <p>Lampeggio veloce Bip veloce</p>	
<p><b>CHIAMATA DI EMERGENZA</b> Richiesta aiuto da altra infermiera</p>	  	  <p>Lampeggio lento Bip medio</p>	
<p><b>ALLARME BIOMEDICO</b></p>		  <p>Lampeggio lento Bip medio</p>	
<p><b>CHIAMATA DAL BAGNO</b></p>	 	  <p>Luce fissa Bip lento</p>	
<p><b>CHIAMATA PAZIENTE</b></p>	 	  <p>Luce fissa Bip lento</p>	

# EVENTI BASE ED EVENTI EVOLUTI




**PRESENZA INFERMIERA**

■ L'infermiera si reca nella CAMERA 1 del REPARTO A e segnala la propria presenza.

**1. La situazione a riposo**



**2. Presenza dell'infermiera nella camera**

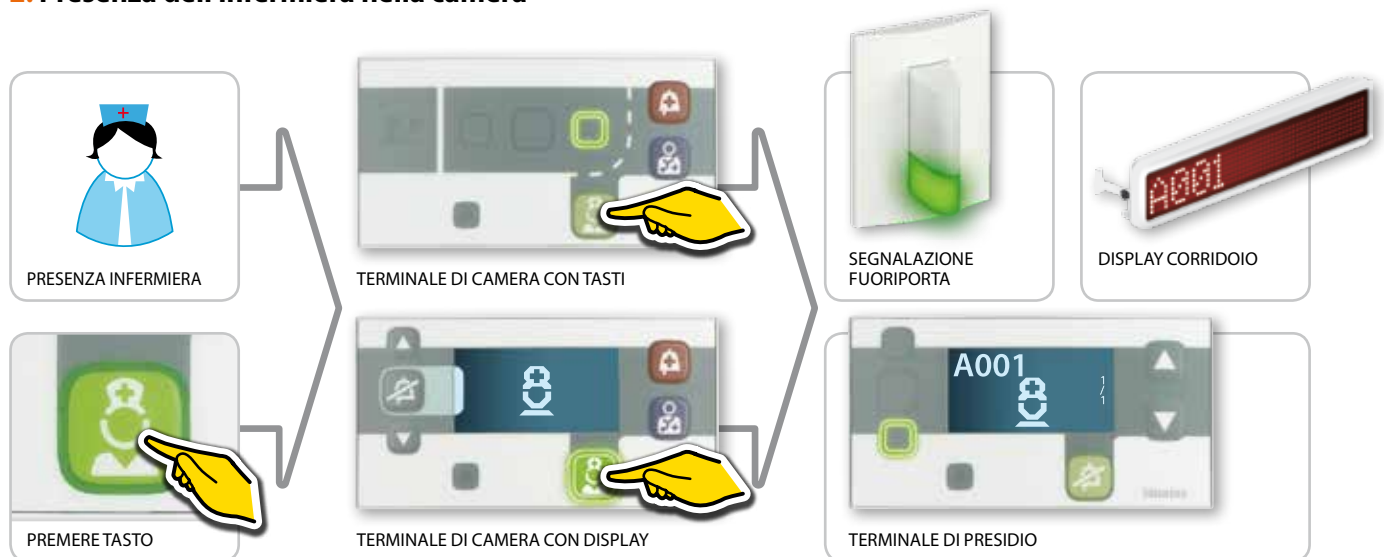


**SE TUTTO È REGOLARE**

PROSEGUIRE AL PUNTO 3

**SE SI VERIFICA UN PROBLEMA**

- ANDARE A PAG. 14 - EVENTO EVOLUTO 05 (*Presenza infermiera + emergenza*)
- ANDARE A PAG. 15 - EVENTO EVOLUTO 06 (*Presenza infermiera + allarme medico*)

**3. Annullo presenza dell'infermiera nella camera**

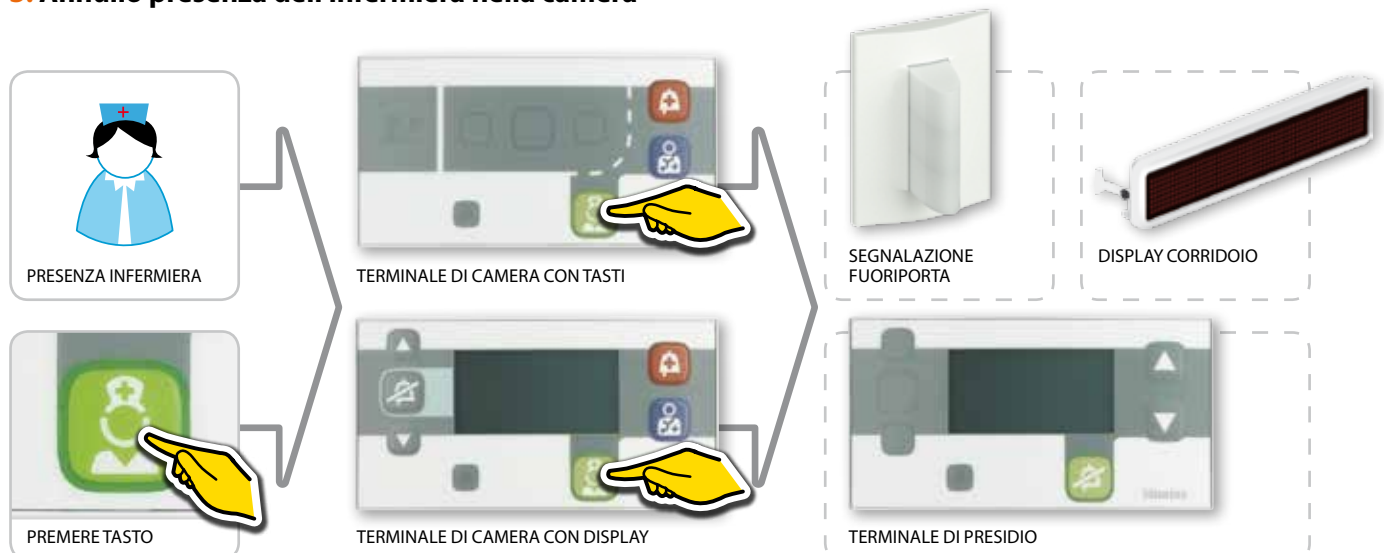


**CHIAMATA DAL LETTO PAZIENTE**


- Il paziente della CAMERA 1 – LETTO 1 effettua una chiamata;
- L'infermiera segnala la sua presenza;
- L'infermiera tacita la chiamata.

**1. La situazione a riposo (vedi pag. 10 - EVENTO BASE 01)**

**2. Il paziente effettua la chiamata dal letto**

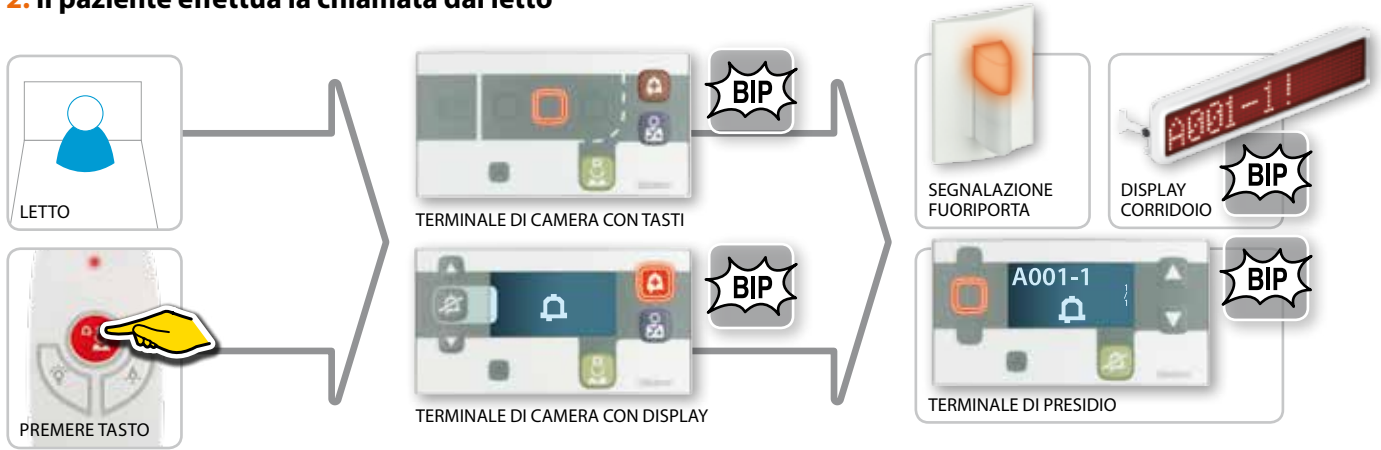


**3. Presenza dell'infermiera in camera a seguito della chiamata**

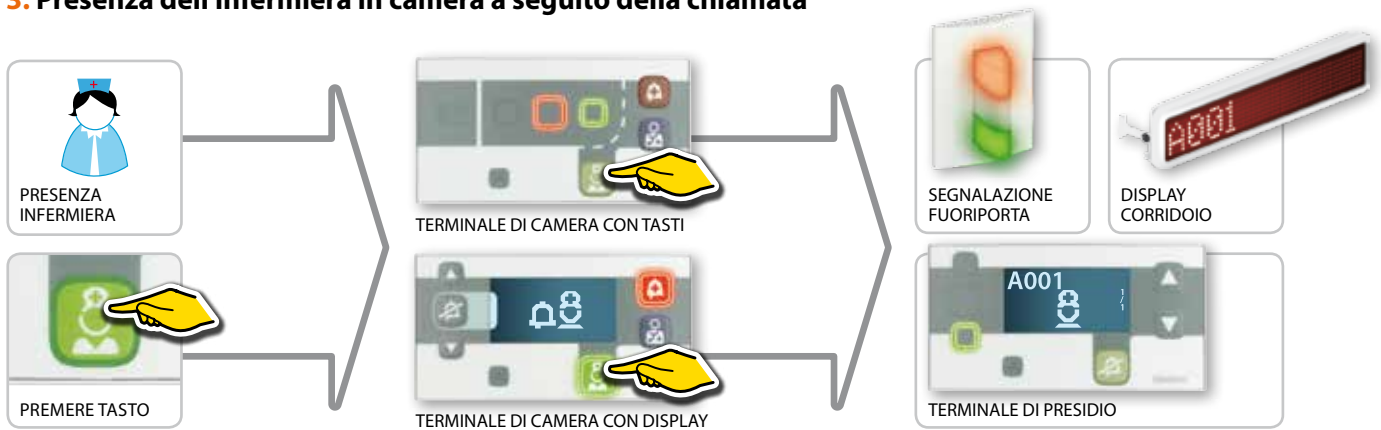

**SE IL PROBLEMA SI RISOLVE**  
 PROSEGUIRE AL PUNTO 4

**SE IL PROBLEMA NON SI RISOLVE**  
 • ANDARE A PAG. 16 - EVENTO EVOLUTO 07 (Chiamata dal letto paziente + emergenza)  
 • ANDARE A PAG. 17 - EVENTO EVOLUTO 08 (Chiamata dal letto paziente + allarme medico)

**4. L'infermiera tacita la chiamata sul terminale di camera**

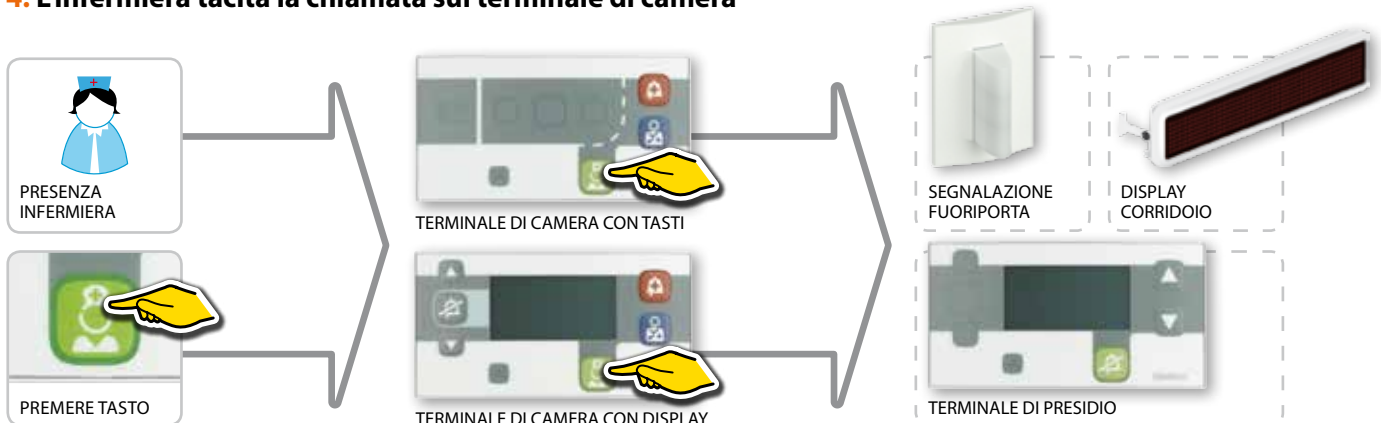


EVENTI BASE

**CHIAMATA DAL BAGNO**


- Il paziente della CAMERA 1 – effettua una chiamata dal bagno;
- L'infermiera segnala la sua presenza;
- L'infermiera tacita la chiamata.

**1. La situazione a riposo (vedi pag. 10 - EVENTO BASE 01)**

**2. Chiamata dal bagno**

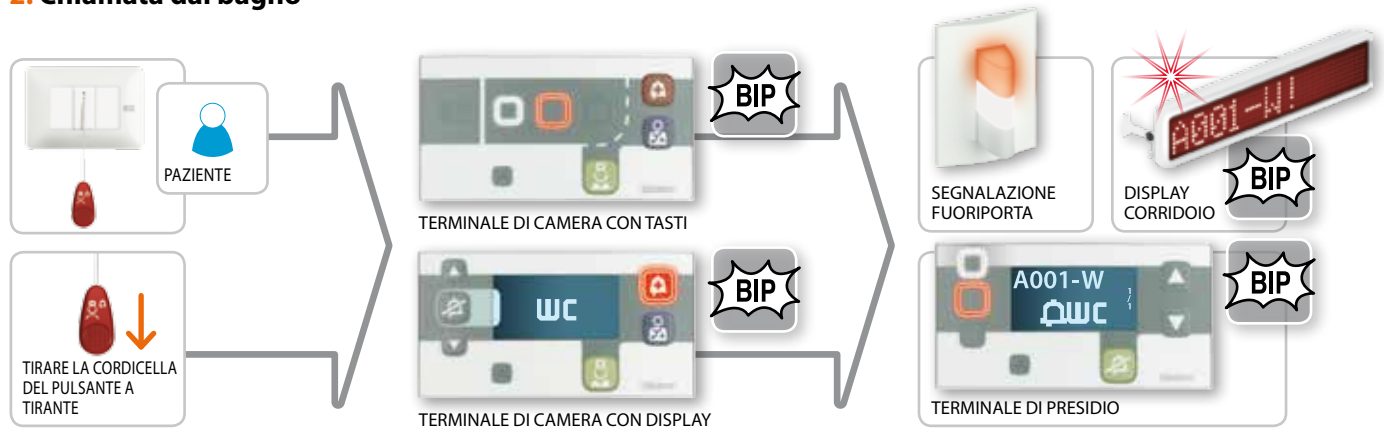

**3. Chiamata dal bagno + presenza infermiera nella camera / bagno**

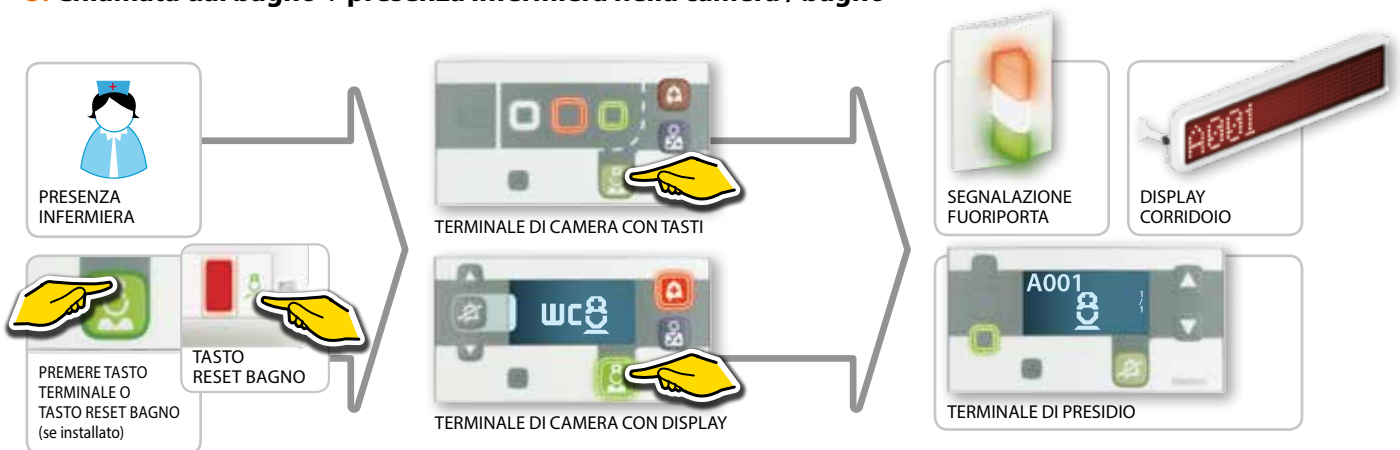


**SE IL PROBLEMA SI RISOLVE**

PROSEGUIRE AL PUNTO 4

**SE IL PROBLEMA NON SI RISOLVE**

- ANDARE A PAG. 18 - EVENTO EVOLUTO 09 (Chiamata dal bagno + emergenza)
- ANDARE A PAG. 19 - EVENTO EVOLUTO 10 (Chiamata dal bagno + allarme medico)


**4. L'infermiera tacita la chiamata**

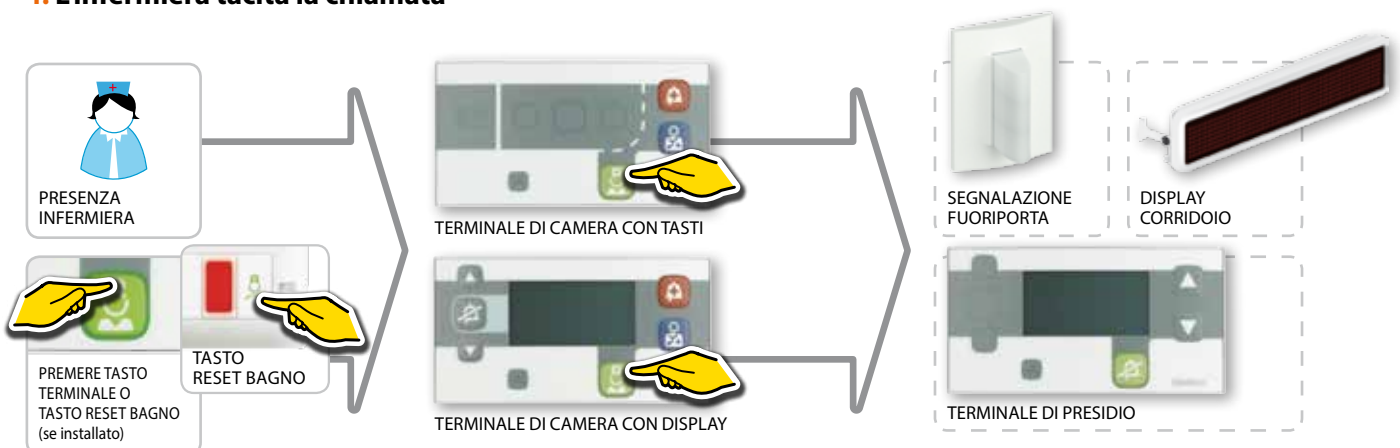


**ALLARME BIOMEDICO**

- Allarme biomedico della CAMERA 1;
- L'infermiera segnala la sua presenza;
- L'infermiera tacita la chiamata.

**1. Il dispositivo di controllo genera un allarme**

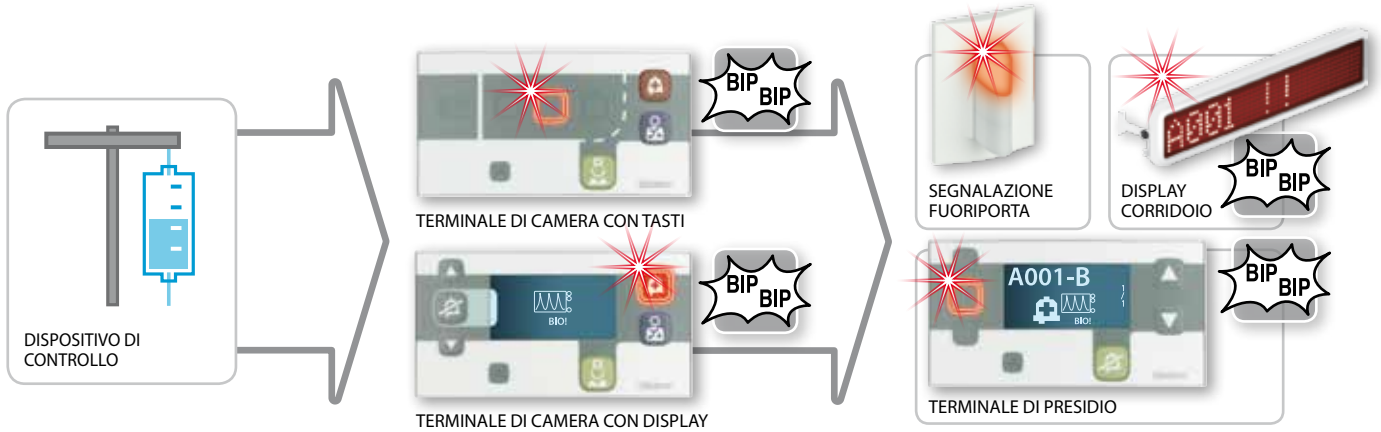

**2. Presenza dell'infermiera nella camera**

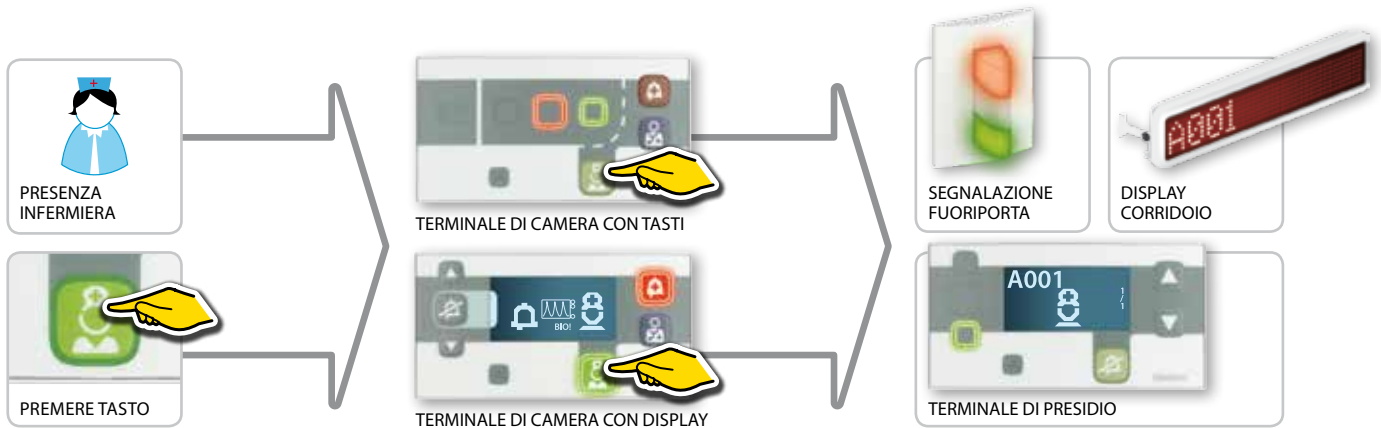


**SE IL PROBLEMA SI RISOLVE**

PROSEGUIRE AL PUNTO 3

**SE IL PROBLEMA NON SI RISOLVE**

- ANDARE A PAG. 20 - EVENTO EVOLUTO 11 (Allarme biomedico + emergenza)
- ANDARE A PAG. 21 - EVENTO EVOLUTO 12 (Allarme biomedico + allarme medico)

**3. L'infermiera tacita la chiamata**

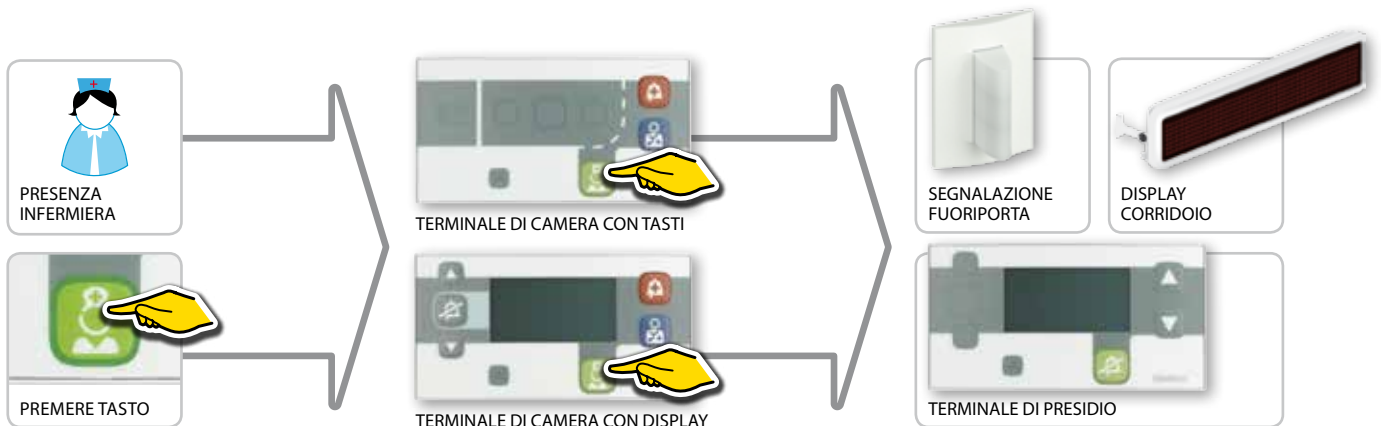


**PRESENZA INFERMIERA + EMERGENZA**


- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 e segnala la propria presenza (EVENTO BASE 01);
- L'infermiera vede una situazione critica effettua una chiamata di emergenza per le colleghe;
- L'infermiera annulla la chiamata.

 La situazione di emergenza continua dal punto 2 di pag. 10 - EVENTO BASE 01


**3. Chiamata di emergenza per le colleghe**

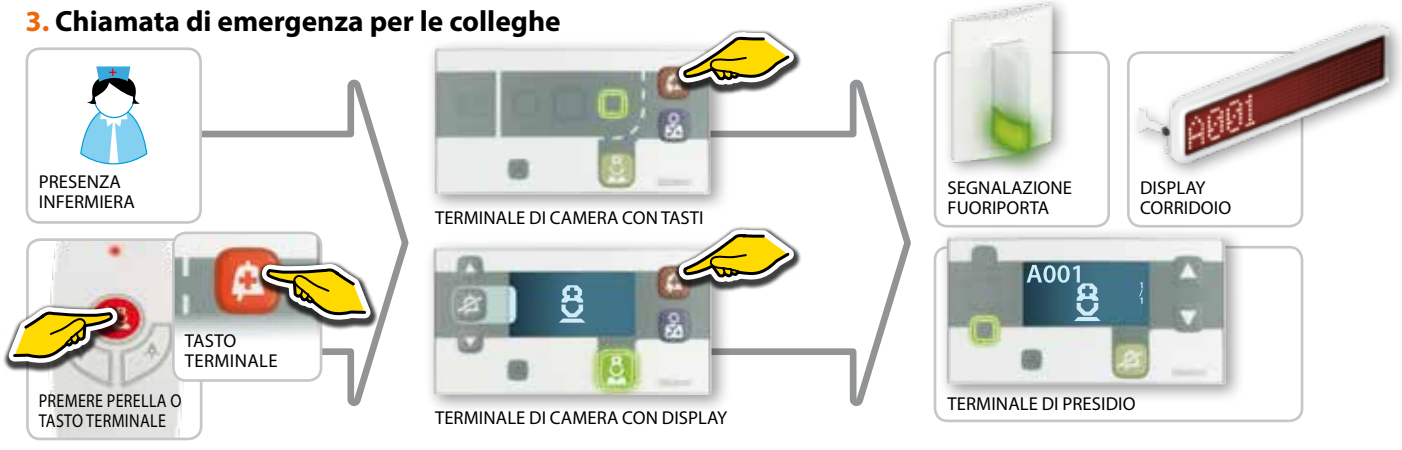


**4. Segnalazione chiamata di emergenza per le colleghe**

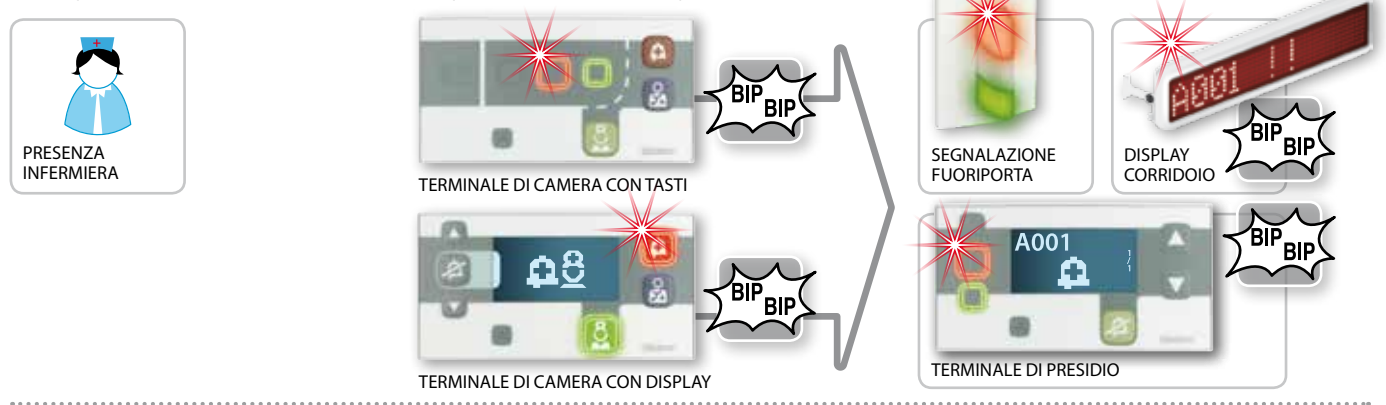

**5. L'infermiera segnala la presenza a seguito della chiamata**

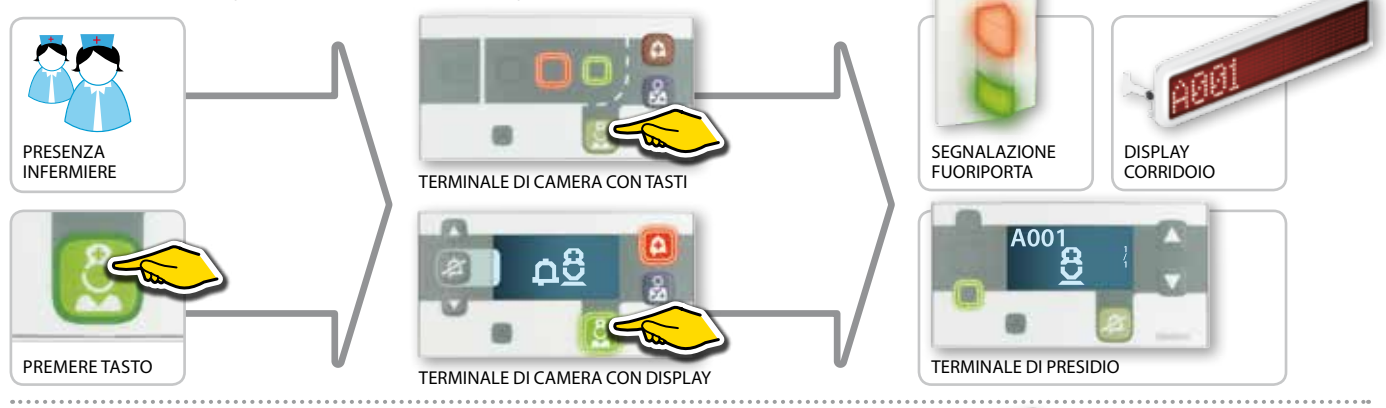

**6. L'infermiera annulla la chiamata**

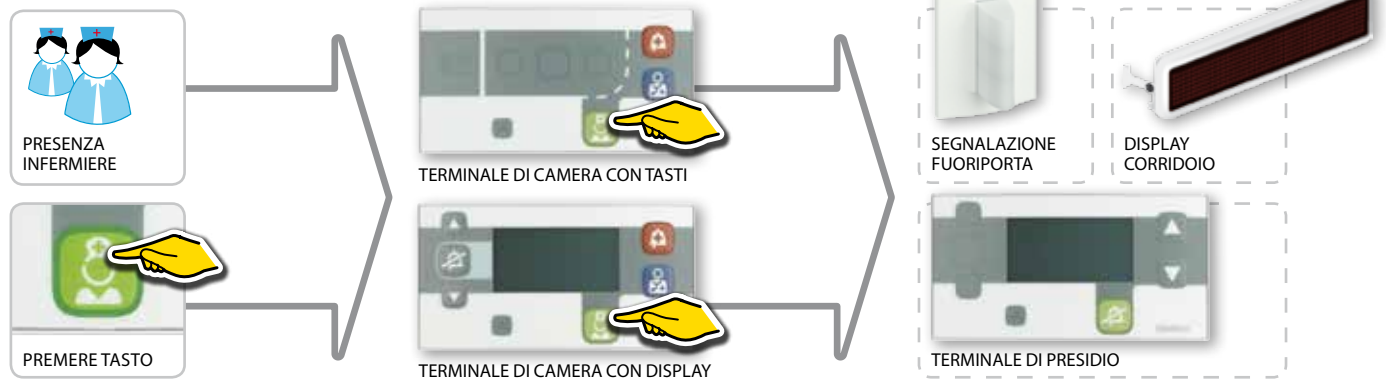




**PRESENZA INFERMIERA + ALLARME MEDICO**


- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 e segnala la propria presenza (EVENTO BASE 01);
- L'infermiera vede una situazione critica effettua una chiamata di allarme per il medico;
- Il medico segnala la presenza;
- L'infermiera annulla la chiamata.

 La situazione di emergenza continua dal punto 2 di pag. 10 - EVENTO BASE 01


**3. Chiamata di allarme per il medico**

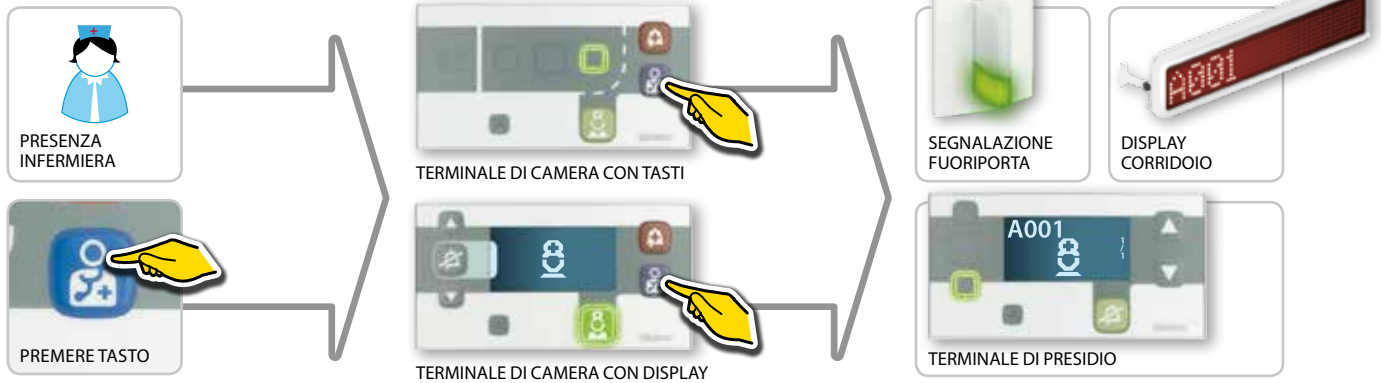

**4. Segnalazione chiamata di allarme per il medico**

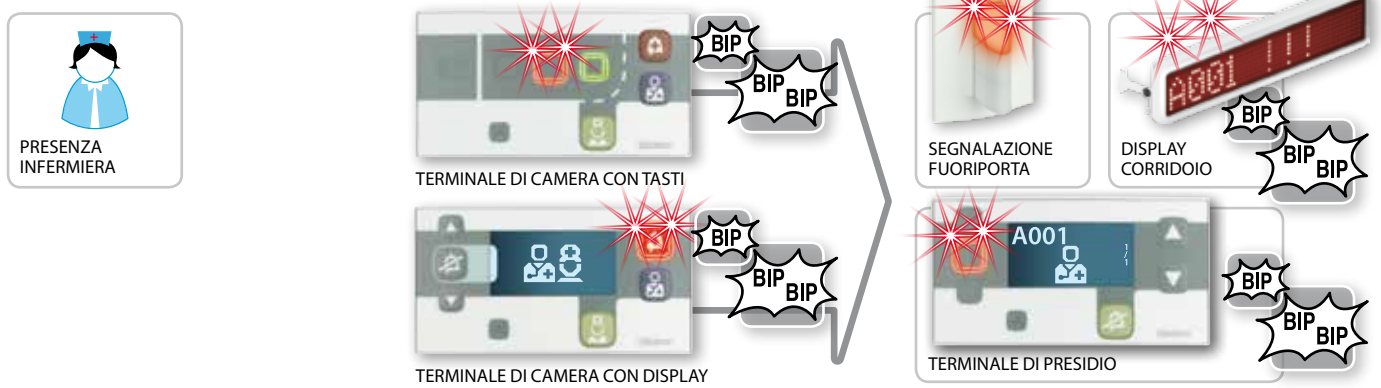

**5. Il medico segnala la presenza a seguito della chiamata**

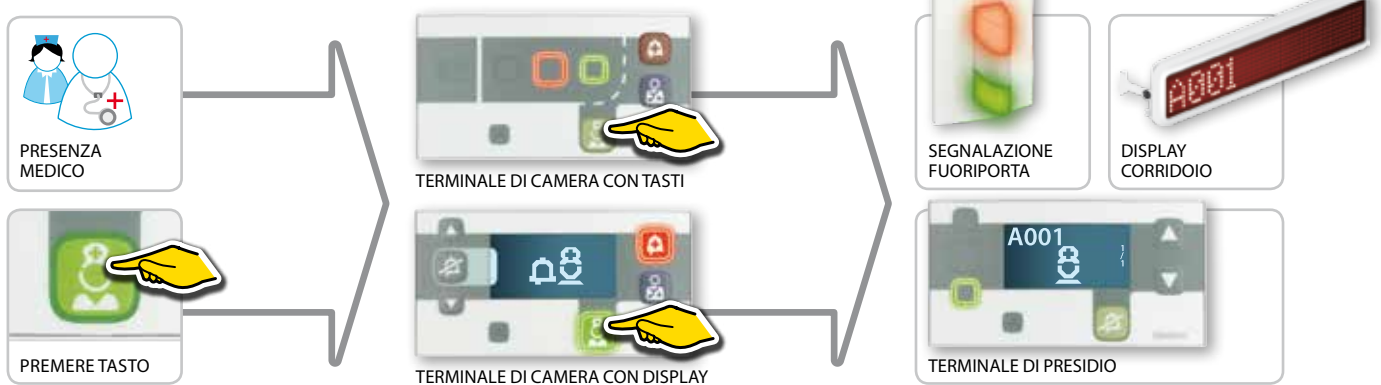

**6. L'infermiera annulla la chiamata**




EVENTI EVOLUTI

**CHIAMATA DAL LETTO PAZIENTE + EMERGENZA**

- Il paziente della CAMERA 1 – LETTO 1 ha effettuato una chiamata (EVENTO BASE 02);
- L'infermiera ha segnalato la sua presenza (EVENTO BASE 02);
- L'infermiera vista la situazione critica effettua una chiamata di emergenza per le colleghe;
- L'infermiera tacita la chiamata.

 **La situazione di emergenza continua dal punto 3 di pag. 11 - EVENTO BASE 02**

**4. Chiamata di emergenza per le colleghe**

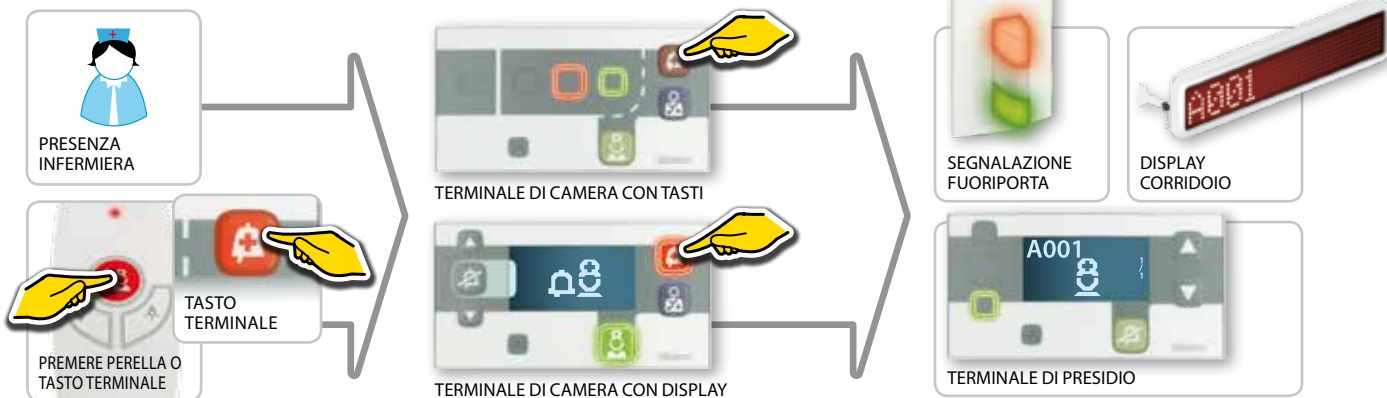

**5. Segnalazione chiamata di emergenza per le colleghe**



**6. La seconda infermiera conferma la presenza**



**7. L'infermiera annulla la chiamata**




**CHIAMATA DAL LETTO PAZIENTE + ALLARME MEDICO**


- Il paziente della CAMERA 1 – LETTO 1 ha effettuato una chiamata (EVENTO BASE 02);
- L'infermiera ha segnalato la sua presenza (EVENTO BASE 02);
- L'infermiera vista la situazione critica effettua una chiamata di allarme per il medico;
- Il medico conferma la presenza;
- L'infermiera tacita la chiamata.

 La situazione di emergenza continua dal punto 3 di pag. 11 - EVENTO BASE 02


**4. Chiamata di allarme per il medico**

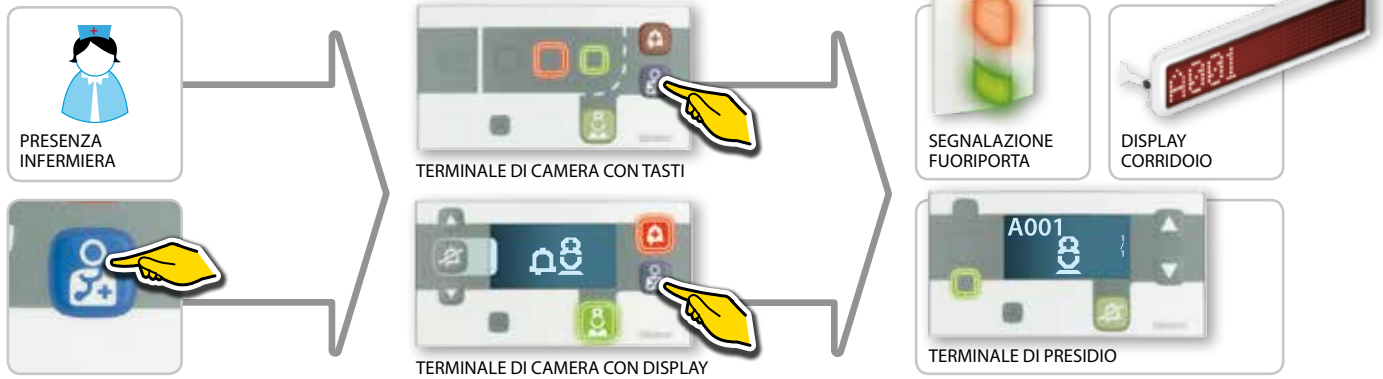

**5. Segnalazione chiamata di allarme per il medico**

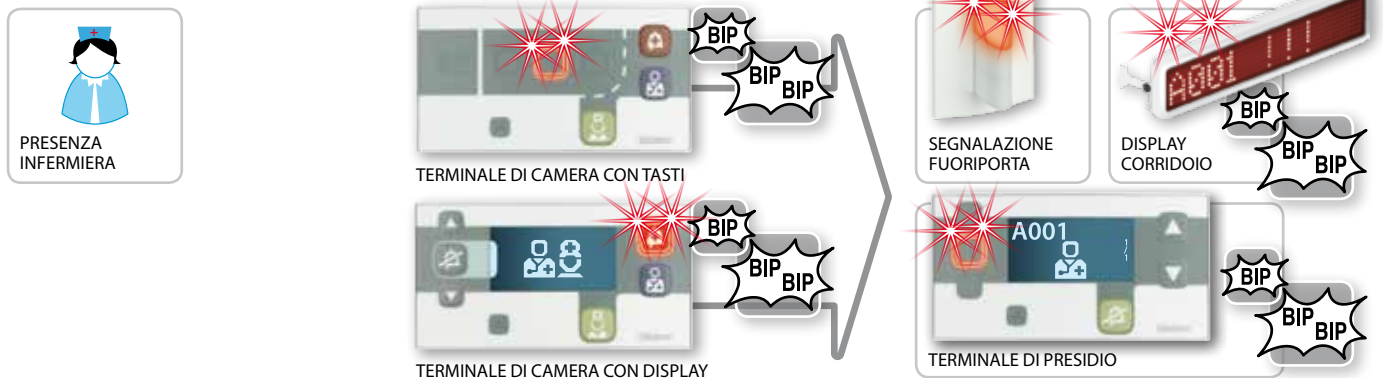

**6. Il medico segnala la presenza a seguito della chiamata**

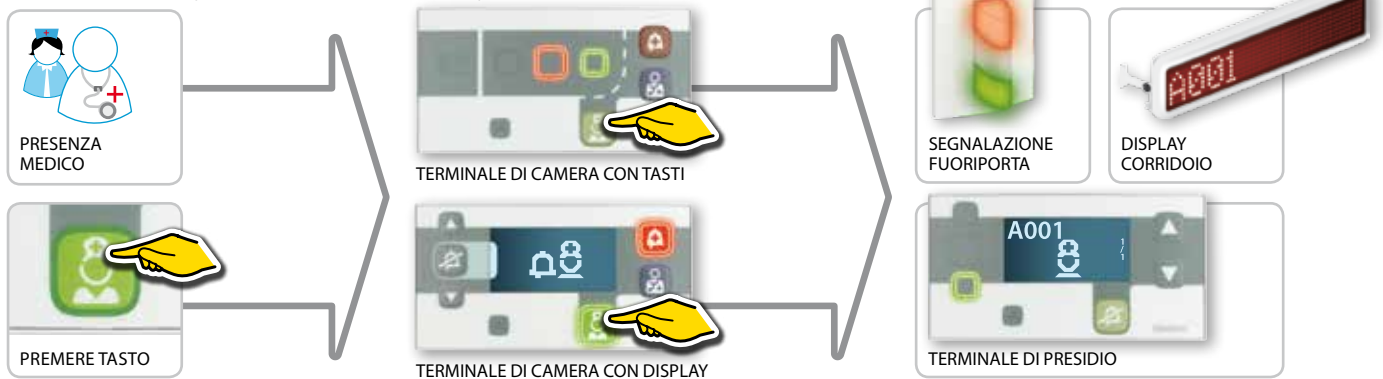

**7. L'infermiera annulla la chiamata**




EVENTI EVOLUTI

**CHIAMATA DAL BAGNO + EMERGENZA**


- Il paziente della CAMERA 1 – effettua una chiamata dal bagno (EVENTO BASE 03);
- L'infermiera segnala la sua presenza (EVENTO BASE 03);
- L'infermiera vista la situazione critica effettua una chiamata di emergenza per le colleghe;
- La nuova infermiera conferma la presenza;
- L'infermiera tacita la chiamata.

**La situazione di emergenza continua dal punto 3 di pag. 12 - EVENTO BASE 03**


**4. Chiamata di emergenza per le colleghe**

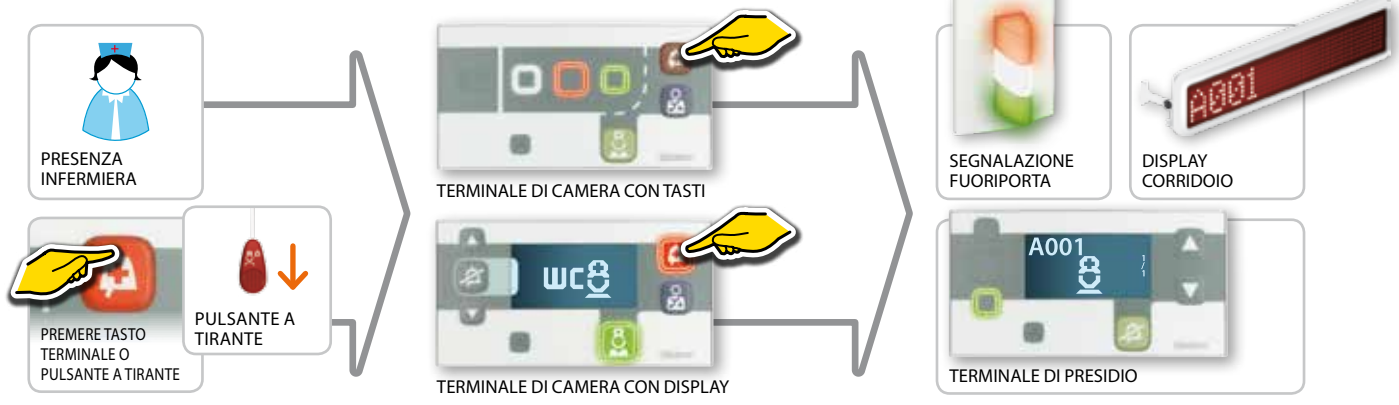


**5. Segnalazione chiamata di emergenza per le colleghe**

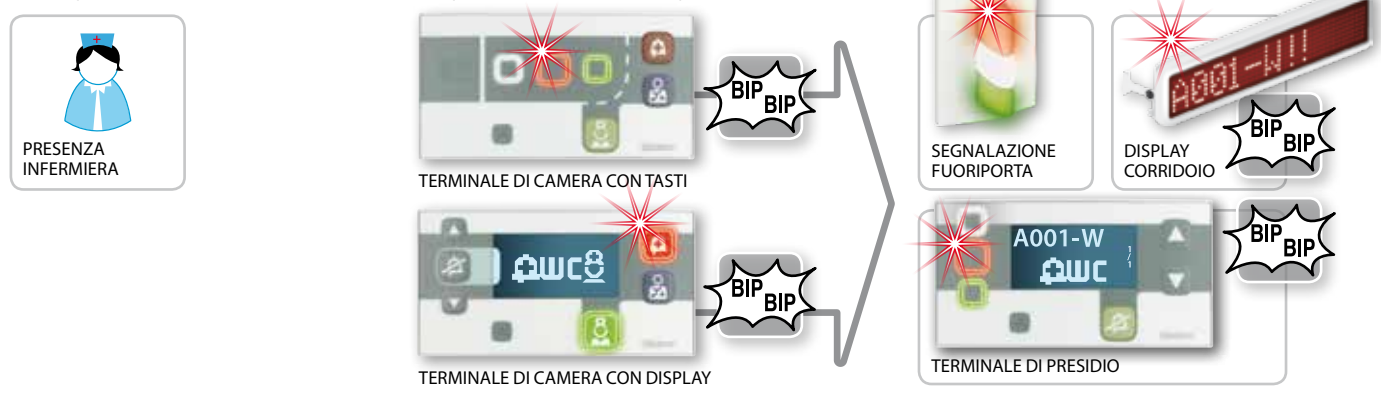

**6. La seconda infermiera conferma la presenza**

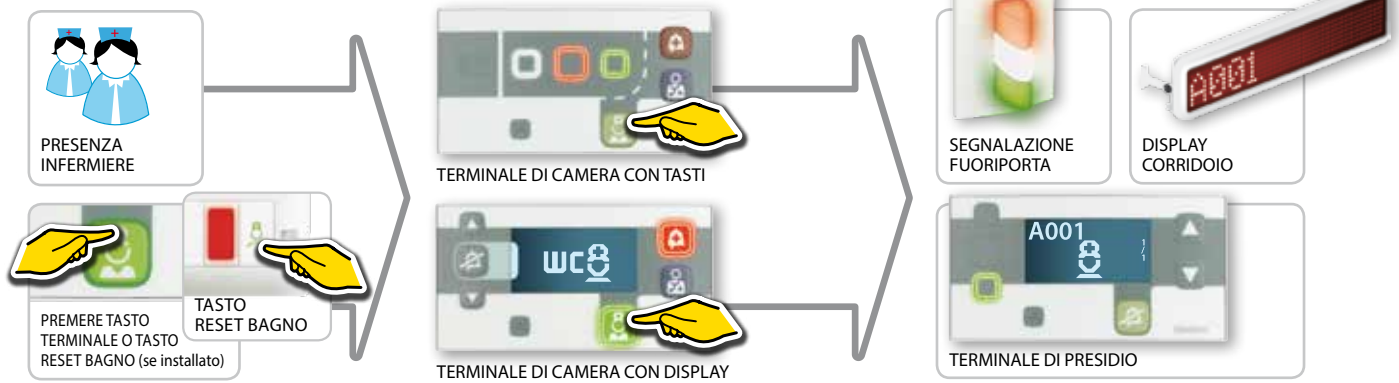

**7. L'infermiera annulla la chiamata**

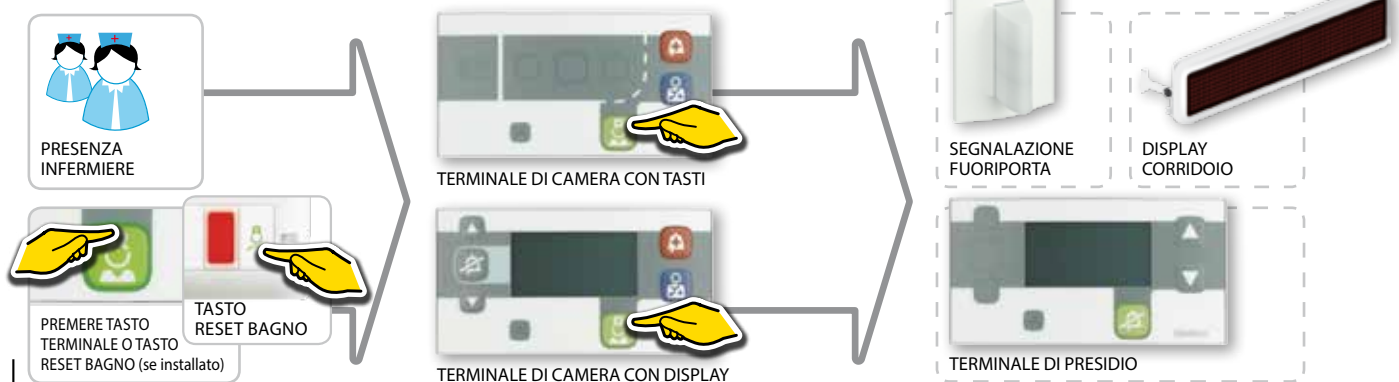


**CHIAMATA DAL BAGNO + ALLARME MEDICO**


- Il paziente della CAMERA 1 – effettua una chiamata dal bagno (EVENTO BASE 03);
- L'infermiera segnala la sua presenza (EVENTO BASE 03);
- L'infermiera vista la situazione critica effettua una chiamata di allarme per il medico;
- Il medico conferma la presenza;
- L'infermiera resetta la chiamata.

 La situazione di emergenza continua dal punto 3 di pag. 12 - EVENTO BASE 03

**4. Chiamata di allarme per il medico**

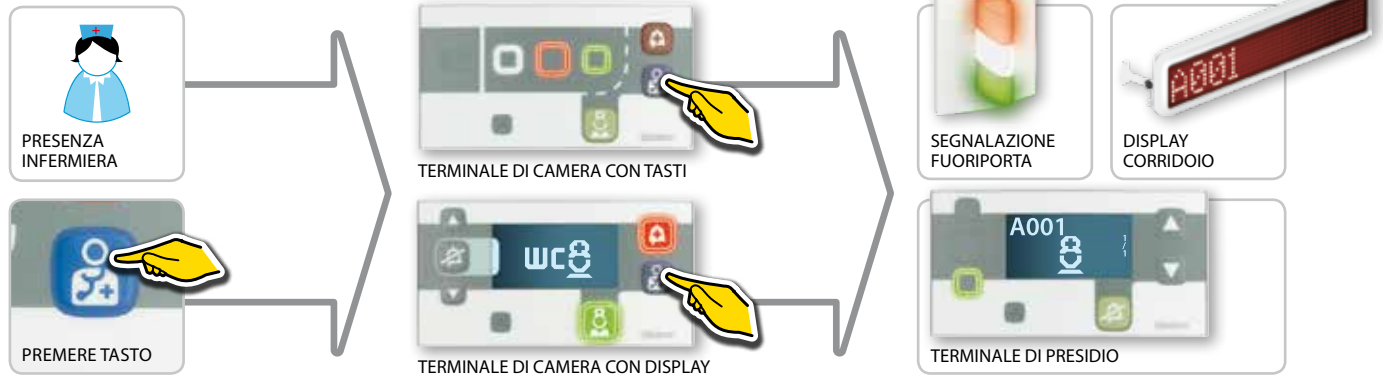


**5. Segnalazione chiamata di allarme per il medico**

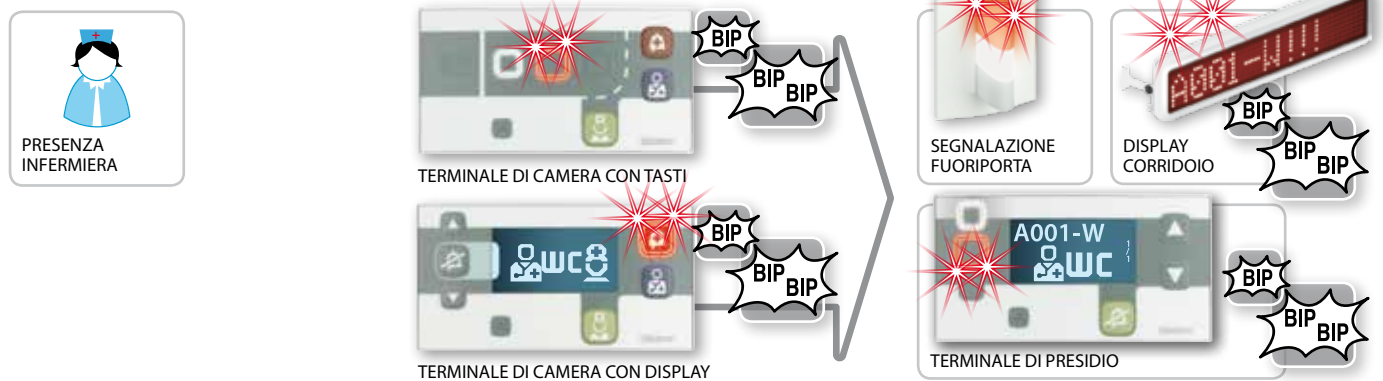

**6. Il medico segnala la presenza a seguito della chiamata**



**7. L'infermiera annulla la chiamata mediante pulsante nel bagno**

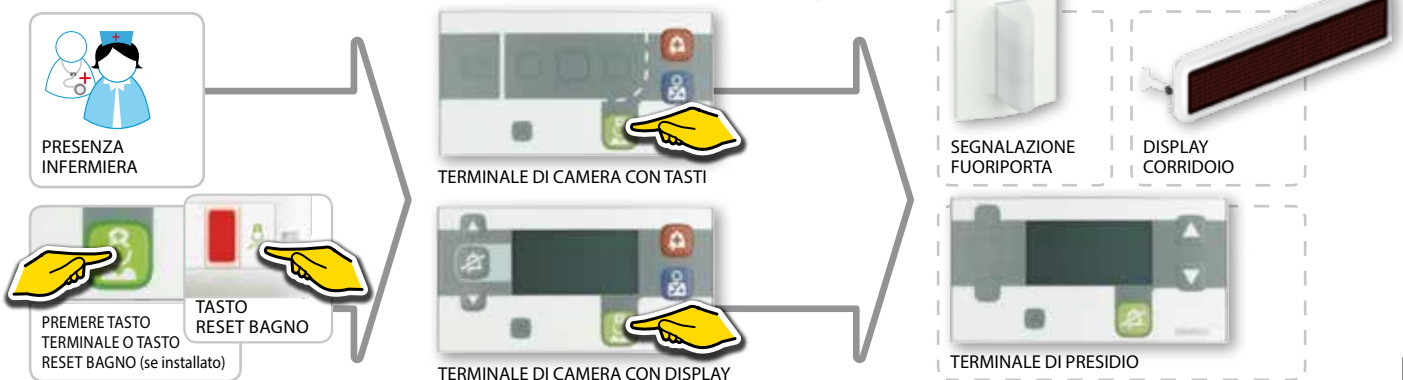


EVENTI EVOLUTI

**ALLARME BIOMEDICO + EMERGENZA**


- Allarme biomedico della CAMERA 1 (EVENTO BASE 04);
- L'infermiera segnala la sua presenza (EVENTO BASE 04);
- L'infermiera vista la situazione critica chiama la collega premendo il tasto di emergenza;
- La nuova infermiera segnala la presenza;
- L'infermiera resetta la chiamata.

**La situazione di emergenza continua dal punto 2 di pag. 13 - EVENTO BASE 04**


**3. Chiamata di emergenza per le colleghe**

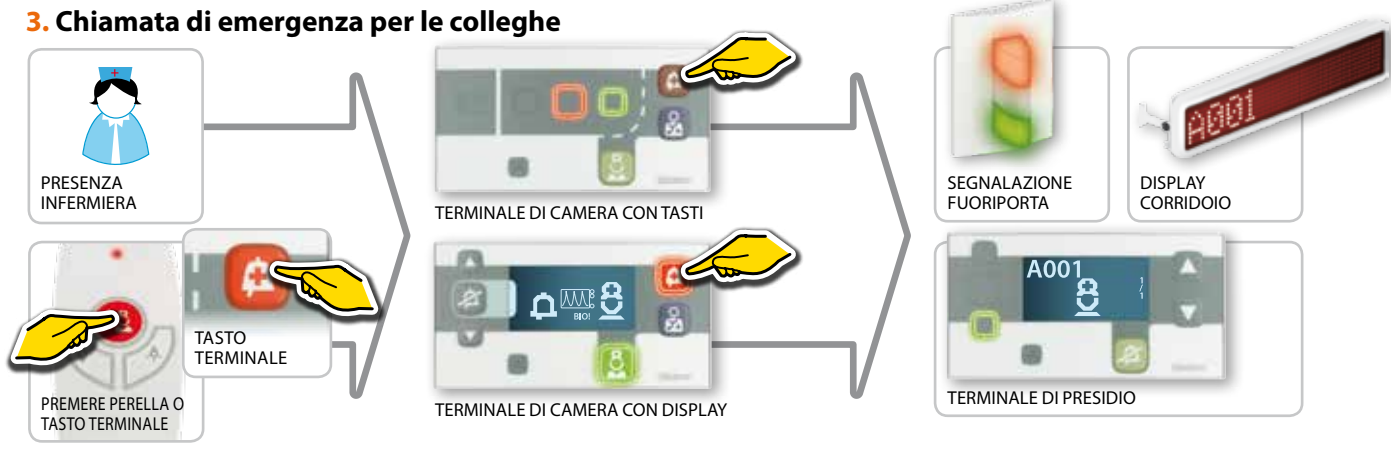


**4. Segnalazione chiamata di emergenza per le colleghe**

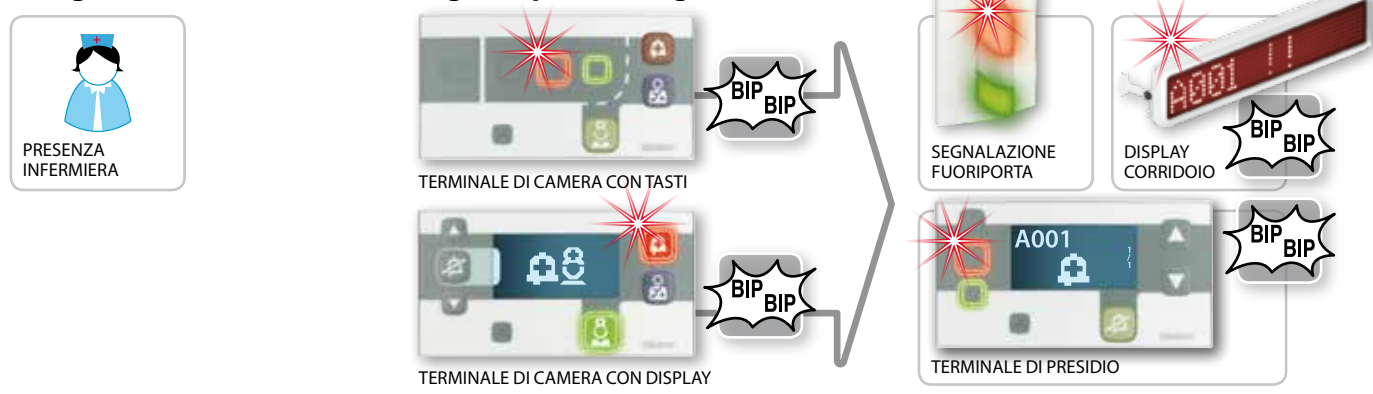

**5. La seconda infermiera conferma la presenza**

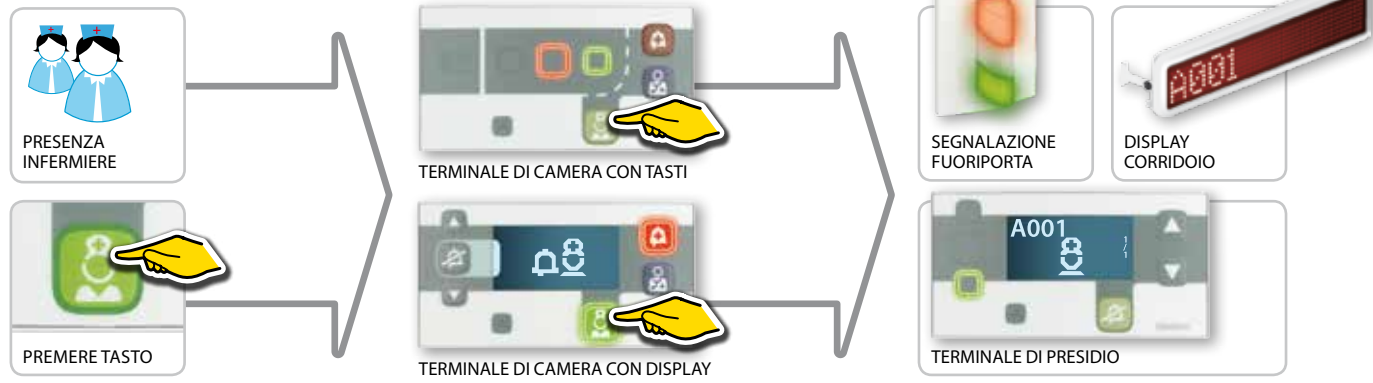

**6. L'infermiera annulla la chiamata**

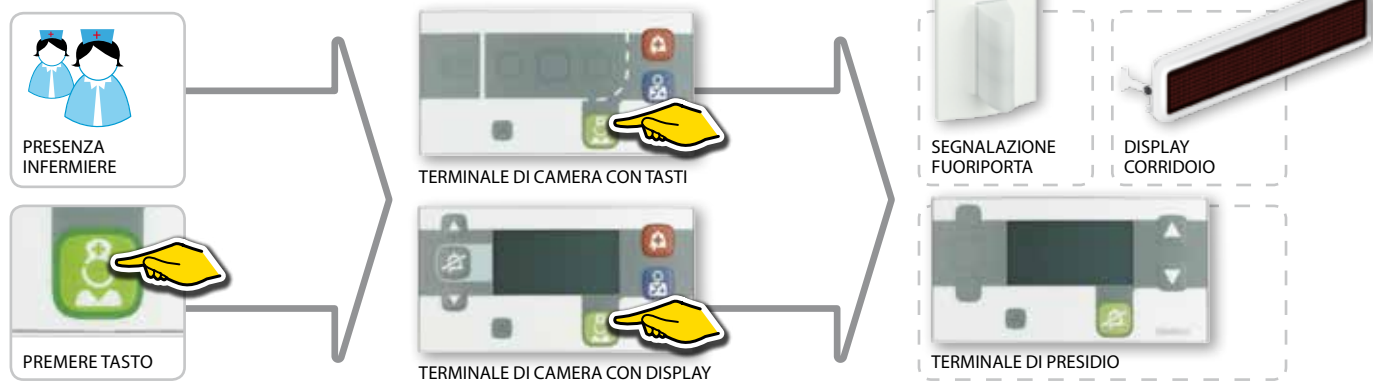


**ALLARME BIOMEDICO + ALLARME MEDICO**


- Allarme biomedico della CAMERA 1 (EVENTO BASE 04);
- L'infermiera segnala la sua presenza (EVENTO BASE 04);
- L'infermiera vista la situazione critica chiama il medico premendo il tasto;
- Il medico segnala la presenza;
- L'infermiera resetta la chiamata.

 La situazione di emergenza continua dal punto 2 di pag. 13 - EVENTO BASE 04


**3. Chiamata di allarme per il medico**

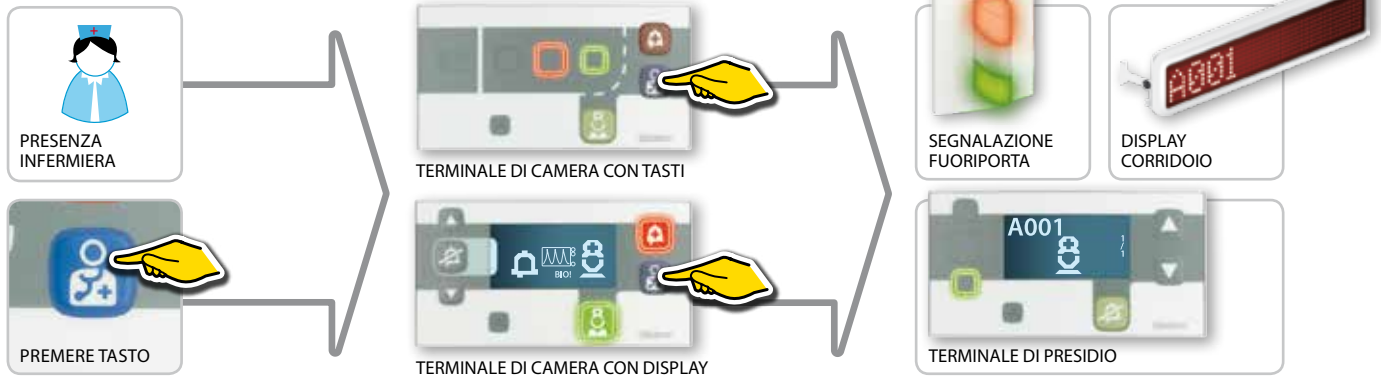


**4. Segnalazione chiamata di allarme per il medico**

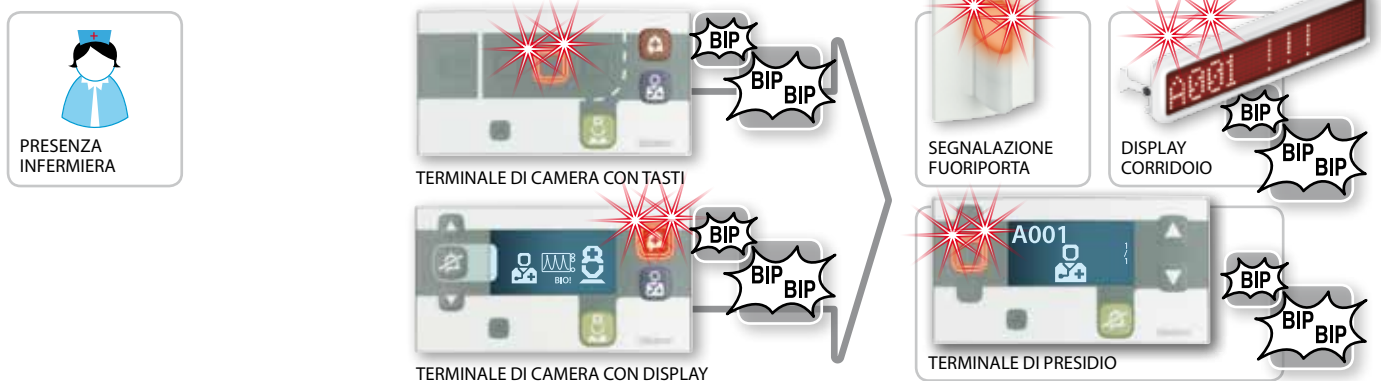

**5. Il medico segnala la presenza a seguito della chiamata**

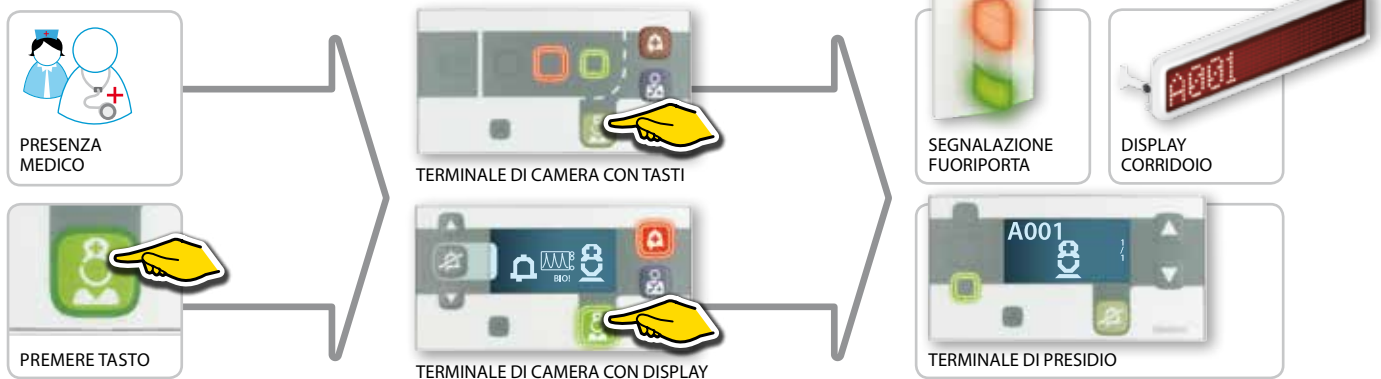

**6. L'infermiera annulla la chiamata**

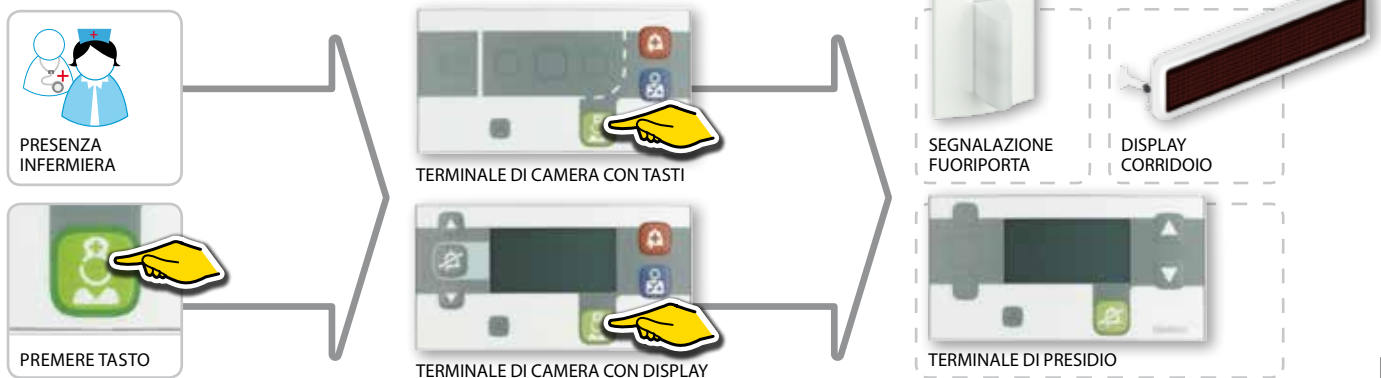


EVENTI EVOLUTI

**SISTEMA ANTIFUGA - USCITA PAZIENTE DA ACCESSO CONTROLLATO**

**1. Controllo accessi - situazione a riposo**



**2. Controllo accessi - allarme uscita\***

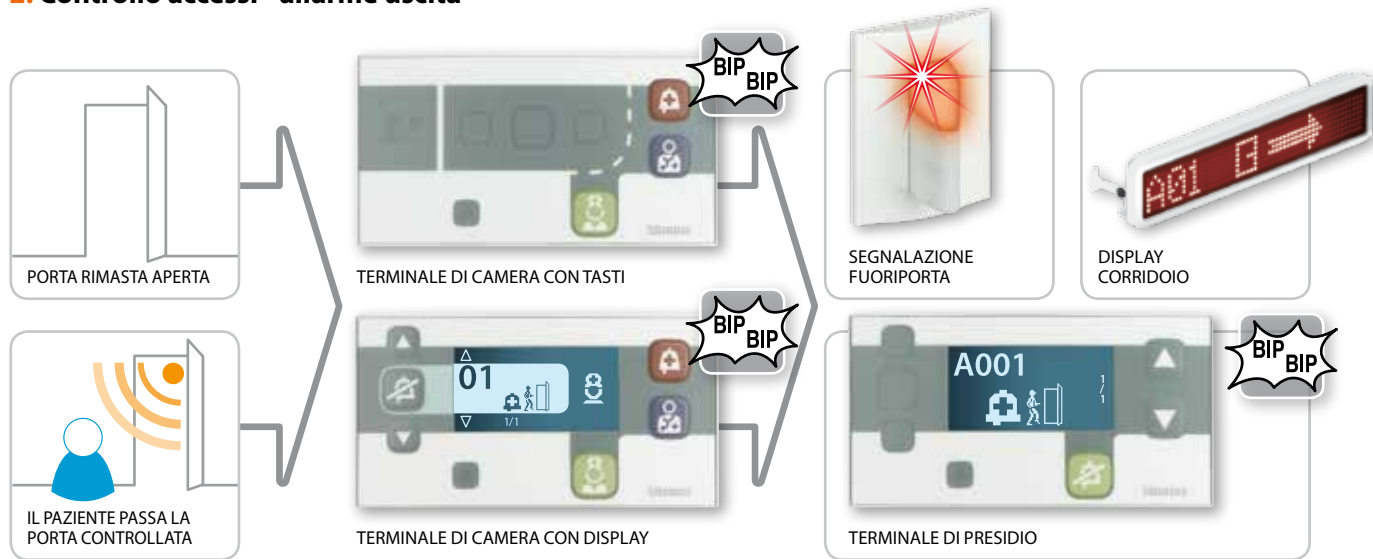


**\* IL PAZIENTE INDOSSA UN BRACCIALETTA RADIO CHE TRASMETTE UN SEGNALE, IL DISPOSITIVO INVIA UN ALLARME DIRETTAMENTE AL SISTEMA DI CHIAMATA, TRAMITE UN TERMINALE DI CAMERA DEDICATO, NON APPENA VIENE VARCATO UNA DELLE SOGLIE DELL'EDIFICIO IMPOSTATE DALL'OPERATORE E PREDISPOSTE CON IL SISTEMA DI RILEVAZIONE. QUALORA IL PAZIENTE DEVE VARCARLA PORTA CON UN ACCOMPAGNATORE È NECESSARIO BLOCCARE IL SISTEMA DI RILEVAZIONE.**



**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI CHIAMATA DA ALTRA CAMERA**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- Avviene una chiamata paziente da altra camera (CAMERA 2);
- La seconda infermiera si reca nella camera allarmata e segnala la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.


**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

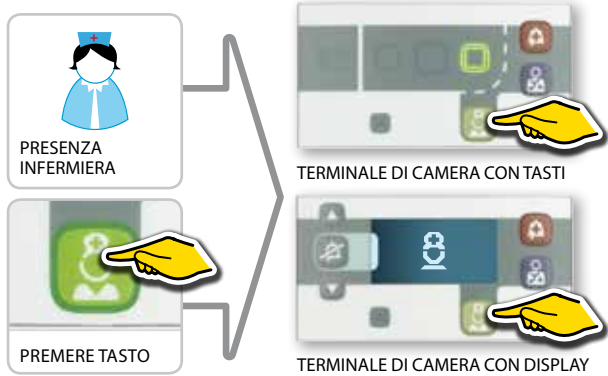


**2. Chiamata da altra camera**




**Chiamata effettuata da camera 2 CAMERA 2**

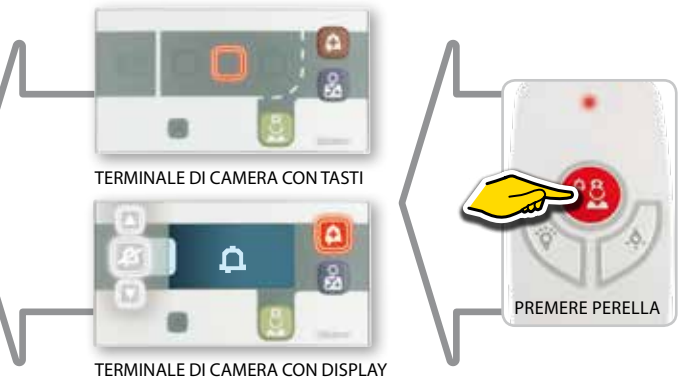

**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**

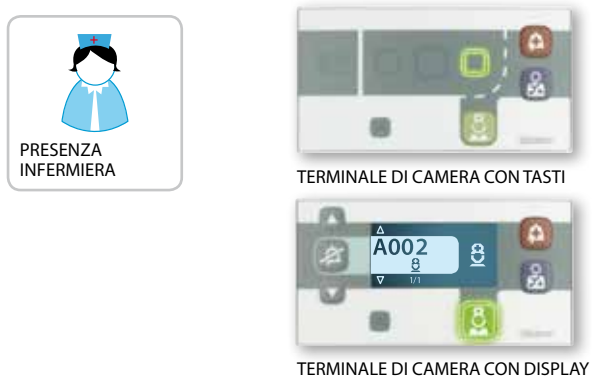


**Presenza seconda infermiera da camera 2**

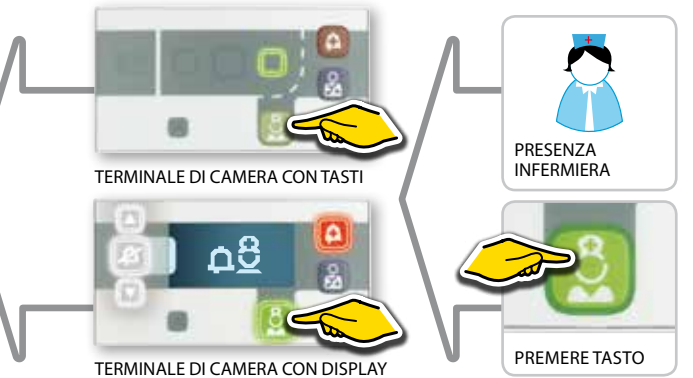

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**



**Reset da camera 2**

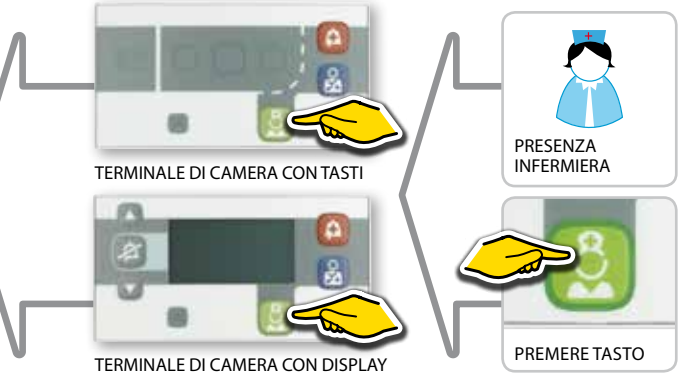


EVENTI EVOLUTI

**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI CHIAMATA DA ALTRO BAGNO**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- Avviene una chiamata paziente da altra bagno;
- La seconda infermiera si reca nel bagno allarmato e segnala la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.


**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

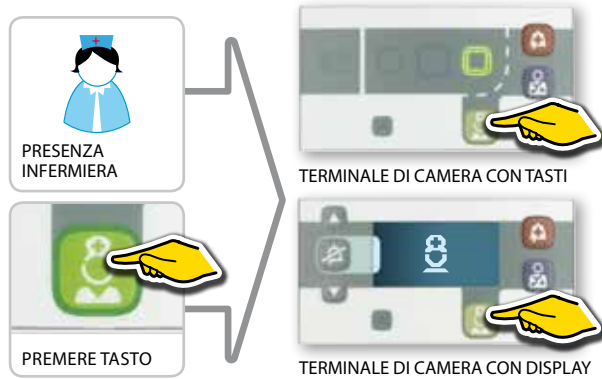

**2. Chiamata bagno da altra camera**




**Chiamata bagno da camera 2 CAMERA 2**

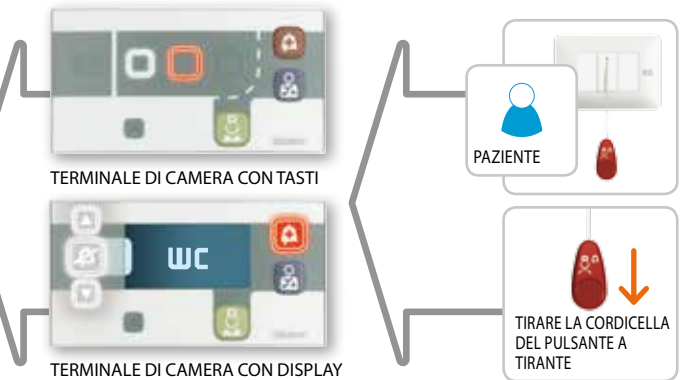

**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**



**Presenza da camera o bagno 2**

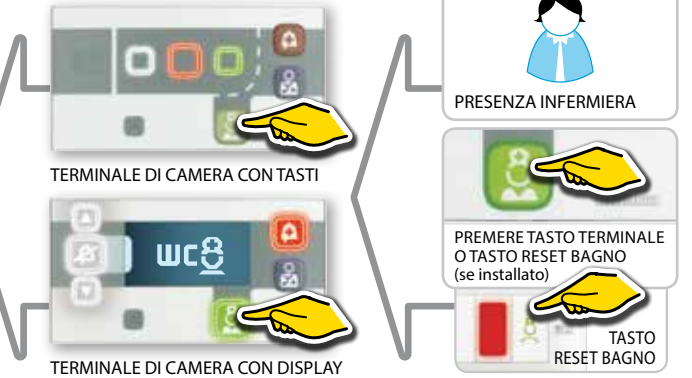

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Reset da camera 2**



**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI CHIAMATA DA BIOMEDICO DA ALTRA CAMERA**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- Avviene un allarme biomedico da altra camera (CAMERA 2);
- La seconda infermiera si reca nella camera allarmata e segnala la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.


**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

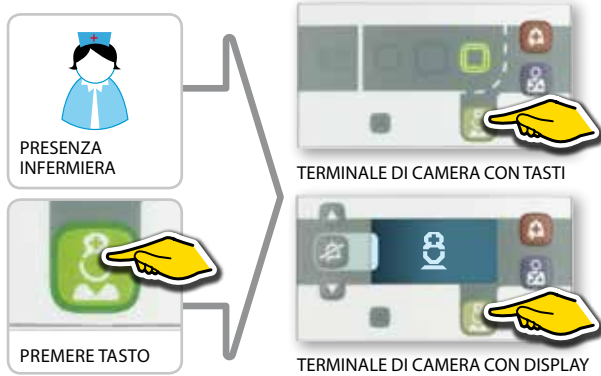


**2. Chiamata biomedico da altra camera**




**Chiamata biomedico da camera 2 CAMERA 2**

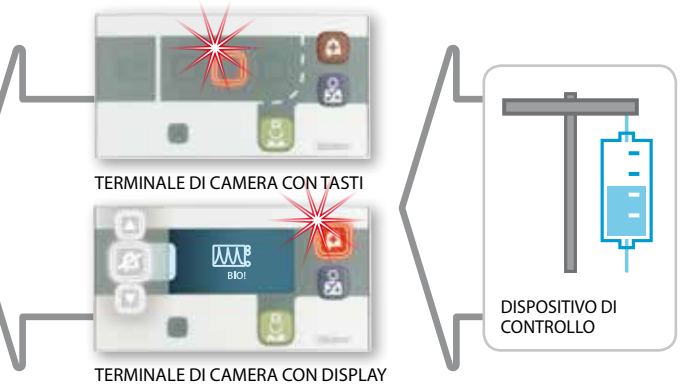


**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**

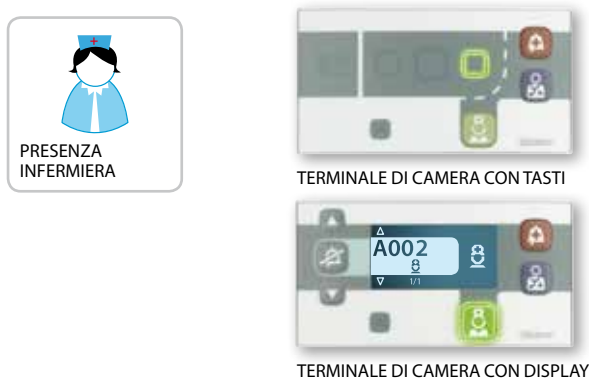


**Presenza in camera 2**

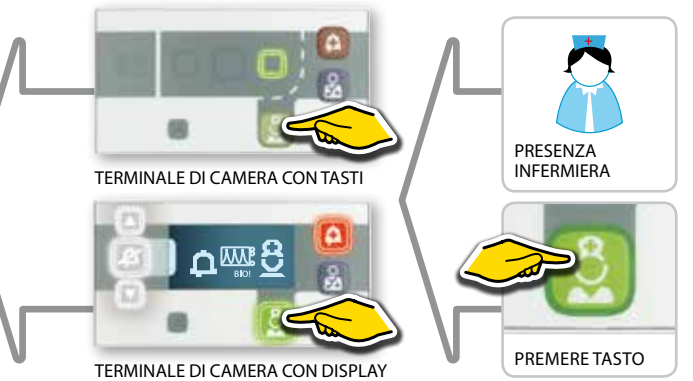

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**

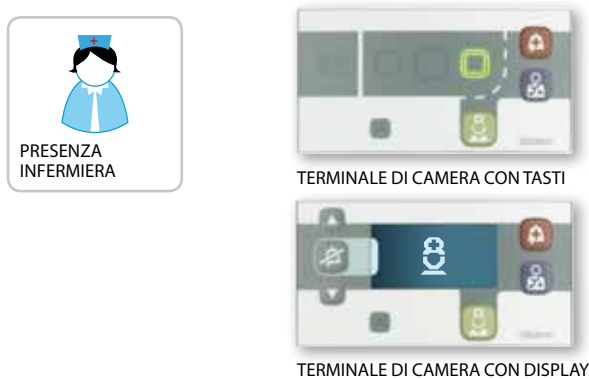


**Reset da camera 2**

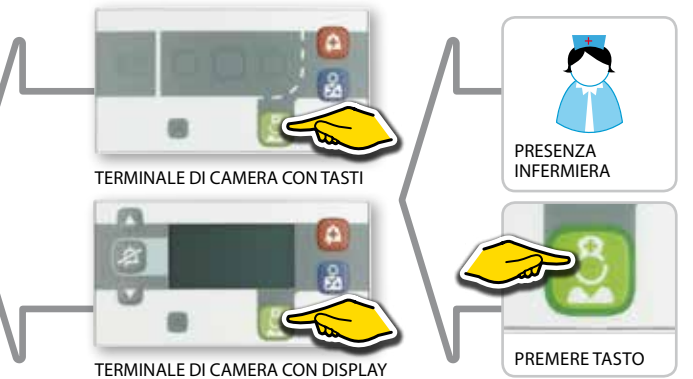


**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI CHIAMATA DI EMERGENZA CON PRESENZA INFERMIERA DA ALTRA CAMERA**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- La seconda infermiera è presente nella seconda camera e vista la situazione critica effettua una chiamata di emergenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.

**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

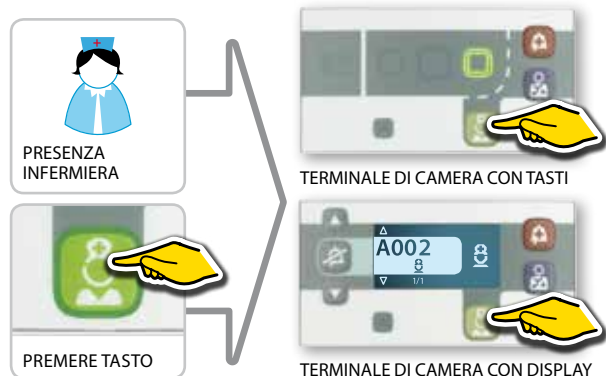


**Presenza infermiera nella camera 2 CAMERA 2**

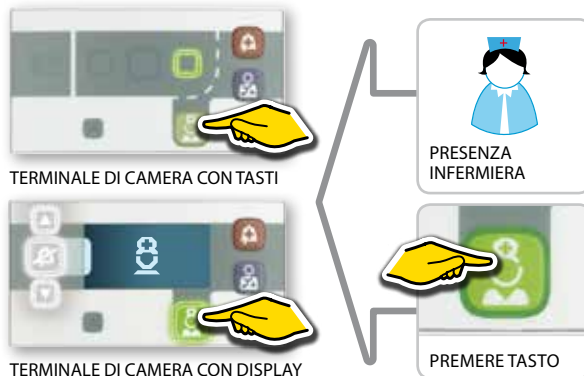

**2. Chiamata emergenza da altra camera**




**Chiamata di emergenza da camera 2**

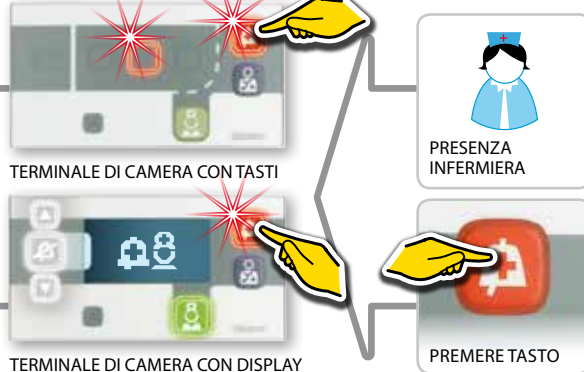

**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Presenza in camera 2**

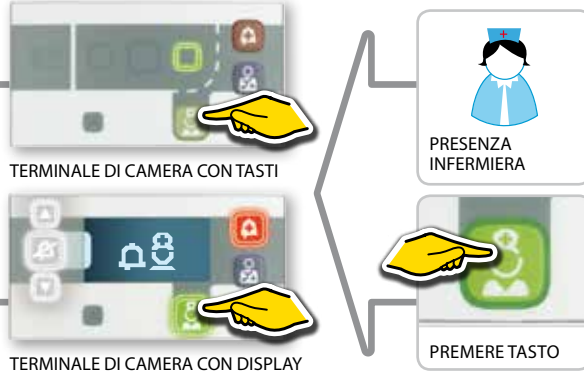

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Reset da camera 2**

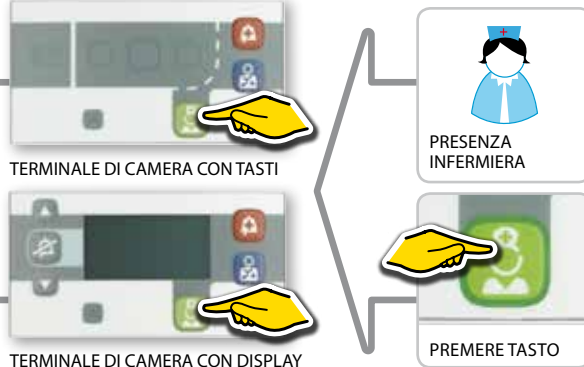


SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI CHIAMATA DI EMERGENZA DA BAGNO IN ALTRA CAMERA

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- La seconda infermiera è presente nel secondo bagno e vista la situazione critica effettua una chiamata di emergenza;
- L'infermiera di soccorso conferma la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.

1. Presenza infermiera nella camera 1 **CAMERA 1**

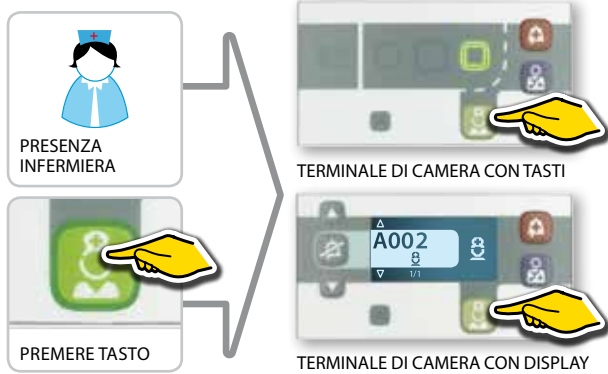

Presenza infermiera nel bagno camera 2 **CAMERA 2**

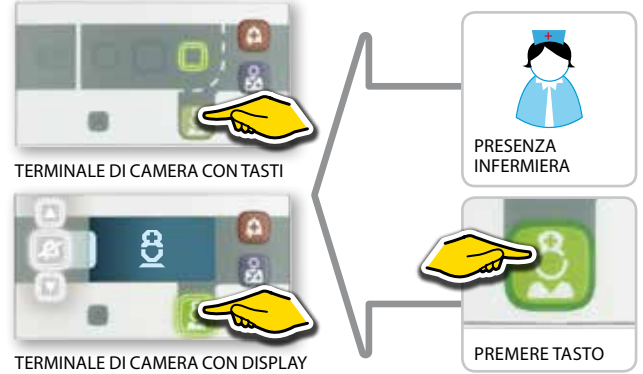

2. Chiamata emergenza da altra camera



Chiamata di emergenza da camera 2



3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera




Presenza in camera 2



4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera



Reset da camera 2

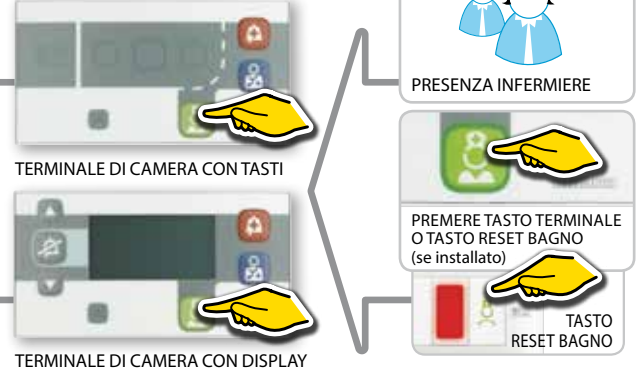


EVENTI EVOLUTI


**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI ALLARME MEDICO IN ALTRA CAMERA**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- La seconda infermiera è presente nella seconda camera e vista la situazione critica effettua una chiamata di allarme medico;
- Il medico conferma la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.

**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

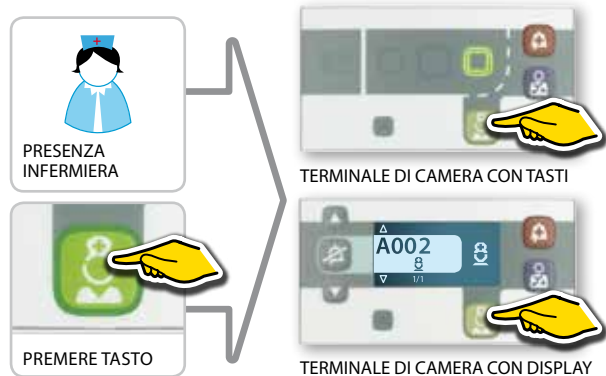

**Presenza infermiera nella camera 2 CAMERA 2**

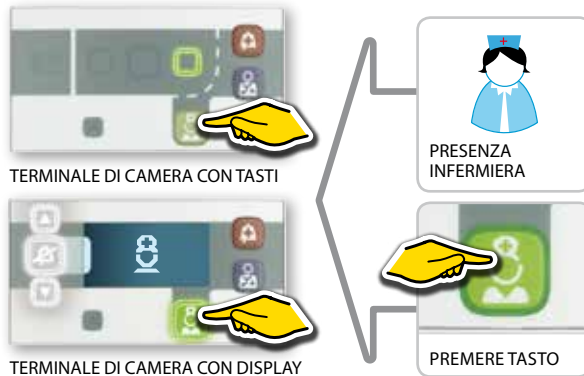

**2. Chiamata di allarme medico da altra camera**




**Chiamata di allarme medico da camera 2**



**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Il medico conferma la presenza in camera 2**

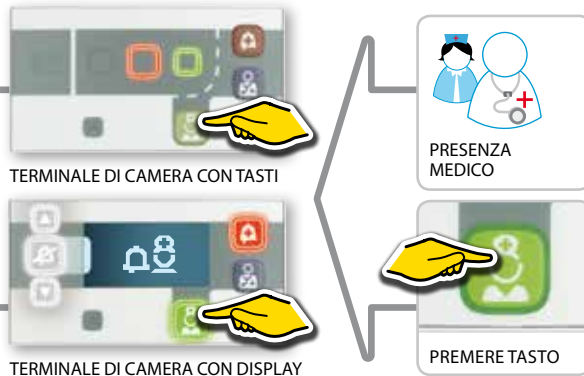

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Reset da camera 2**

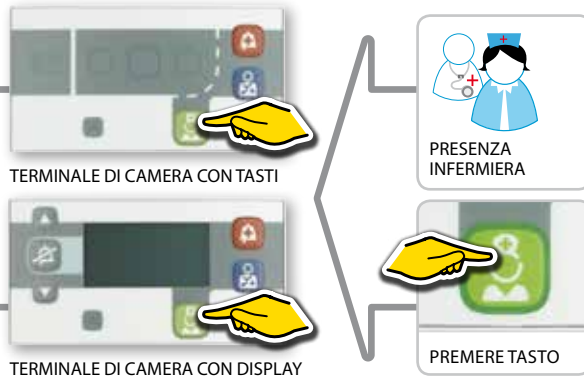


**SEGNALAZIONI SUI TERMINALI DI CAMERA A SEGUITO DI ALLARME MEDICO IN ALTRO BAGNO**

- L'infermiera è presente nella CAMERA 1 (EVENTO BASE 01);
- La seconda infermiera è presente nel secondo bagno e vista la situazione critica effettua una chiamata di allarme medico;
- Il medico conferma la presenza;
- La seconda infermiera resetta la segnalazione.

**1. Presenza infermiera nella camera 1 CAMERA 1**

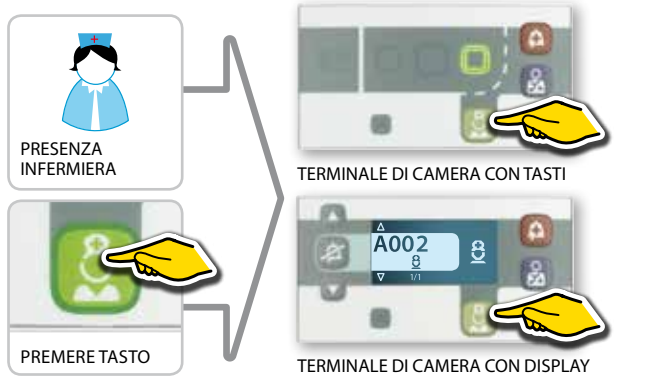


**Presenza infermiera nella camera 2 CAMERA 2**

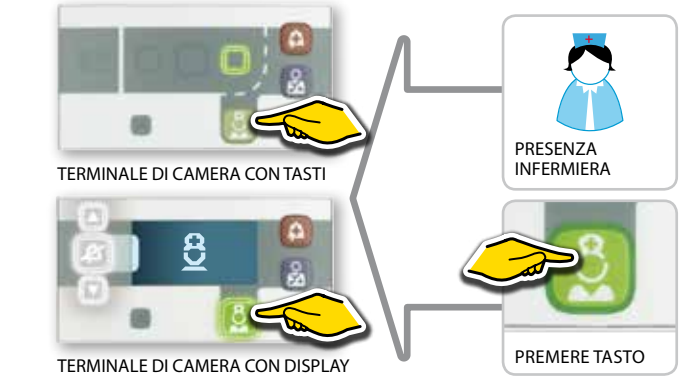

**2. Chiamata di allarme medico da altra camera**




**Chiamata di allarme medico da camera 2**

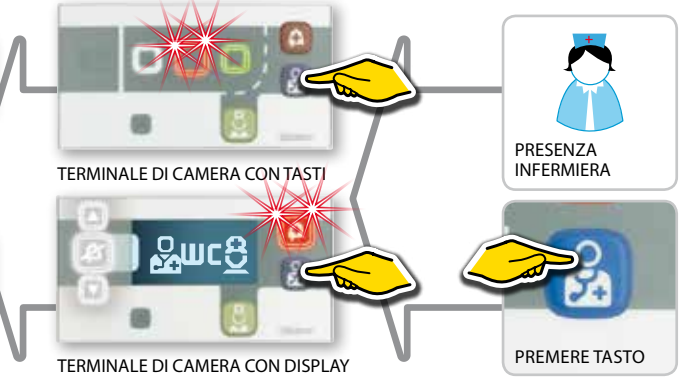

**3. Segnalazione a seguito presenza in altra camera**




**Il medico conferma la presenza in camera 2**

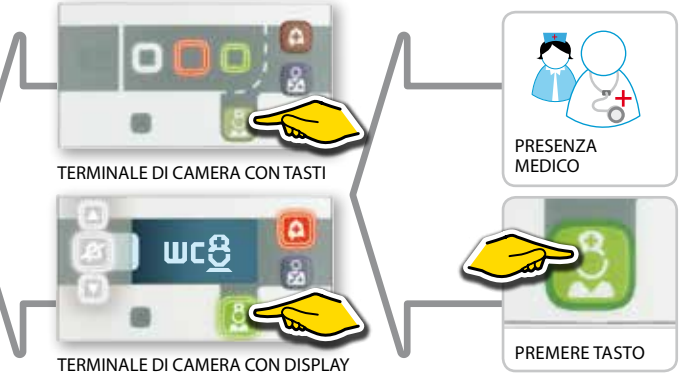

**4. Reset segnalazione a seguito presenza in altra camera**



**Reset da camera 2**

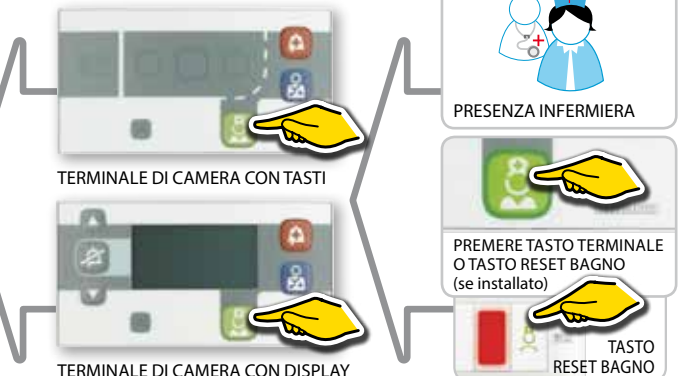


EVENTI EVOLUTI

# COMUNICAZIONE AUDIO





**COMUNICAZIONI DALLA CENTRALE DI PRESIDIO PRINCIPALE E SECONDARIA**

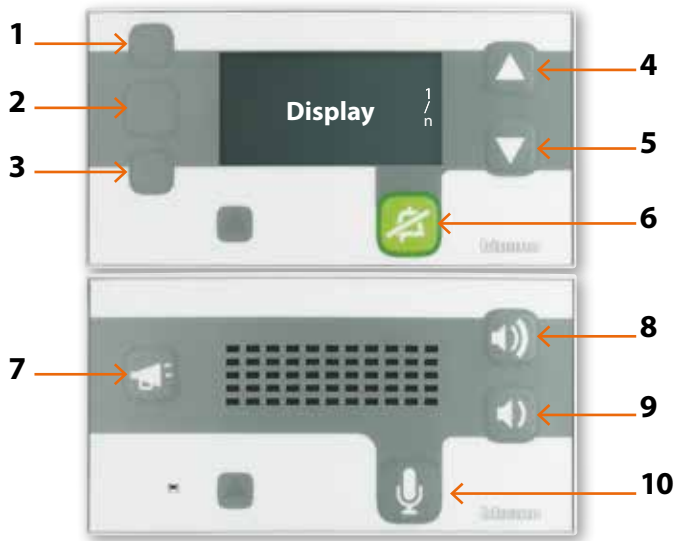

**Legenda**

- 1. Led bianco segnalazione allarme bagno;
- 2. Led rosso segnalazione allarme;
- 3. Led verde segnalazione presenza infermiera;
- 4. Tasto di navigazione;
- 5. Tasto di navigazione;
- 6. Tasto di tacitazione;
- 7. Pulsante di chiamata generale;
- 8. Regolazione volume max.;
- 9. Regolazione volume min.;
- 10. Pulsante vivavoce.

**1. Chiamata generale**

- Premere e tener premuto il tasto **7** per tutto il tempo della comunicazione;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Rilasciare il tasto **7** per terminare la comunicazione.

**NOTA:**

La chiamata generale si attiva su tutti i dispositivi dotati di modulo fonico (terminali di camera e terminali di presidio).

**2. Conversazione con infermiera presente in una camera**

**Se vi sono presenze in più camere selezionare con tasto 4 e 5 la camera interessata**

- Premere e tener premuto il tasto **10** per attivare il canale audio;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Rilasciare il tasto **10** per disattivare il canale audio.

**3. Conversazione con paziente a seguito di una chiamata da pulsantiera letto**

- Premere una volta il tasto **10** per attivare il canale audio;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Verificare il motivo della chiamata con il paziente se:
  - **Falsa chiamata** - premere tasto **6** (si annulla la chiamata luce rossa fuoriporta si spegne);
  - **Chiamata vera** - premere tasto **10** per disattivare canale audio (la luce rossa fuoriporta si resetta dal terminale di camera dopo la presenza).


**SEGNALAZIONI SUL DISPLAY**

Le segnalazioni appaiono sul display in funzione della priorità.

PRIORITY	COMANDI
<b>CHIAMATA DI ALLARME MEDICO</b> Richiesta aiuto medico	
<b>CHIAMATA DI EMERGENZA</b> Richiesta aiuto da altra infermiera	
<b>ALLARME BIOMEDICO</b>	
<b>CHIAMATA DAL BAGNO</b>	
<b>CHIAMATA PAZIENTE</b>	
<b>PRESENZA INFERMIERA</b>	

COMUNICAZIONE AUDIO

**COMUNICAZIONI DAI TERMINALI DI CAMERA**

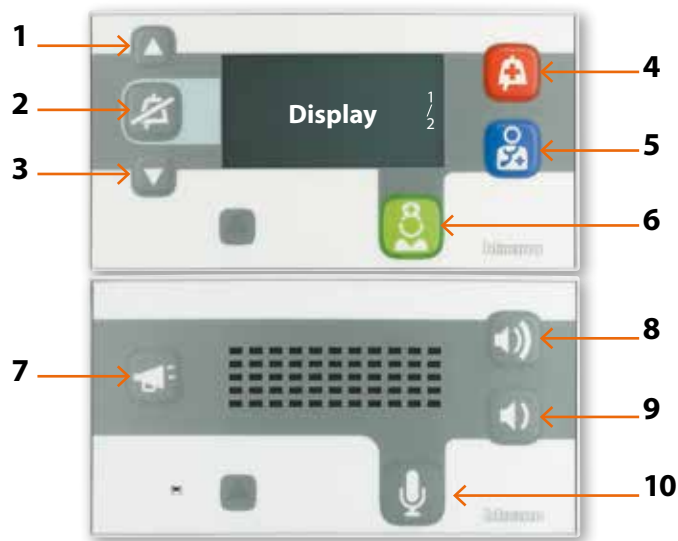

**Legenda**

- 1. Tasto di navigazione;
- 2. Tasto di tacitazione allarme sonoro;
- 3. Tasto di navigazione;
- 4. Pulsante/segnalazione chiamata;
- 5. Pulsante/segnalazione di chiamata medico;
- 6. Pulsante/segnalazione presenza infermiera;
- 7. Pulsante di chiamata generale;
- 8. Regolazione volume max.;
- 9. Regolazione volume min.;
- 10. Pulsante vivavoce.

**1. Chiamata dalla camera con presenza infermiera**

**Si consiglia di eseguire la chiamata generale in quanto non è certa la presenza di altra infermiera presso la centrale di presidio**


- Premere e tener premuto il tasto **7** per tutto il tempo della comunicazione;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Rilasciare il tasto **7** per terminare la comunicazione.

**NOTA:**

La chiamata generale si attiva su tutti i dispositivi dotati di modulo fonico (terminali di camera e terminali di presidio).

**2. Comunicazione tra due infermiere presenti in due camere diverse**

**(sul display di camera deve esser segnalata la presenza della collega come esempio)**

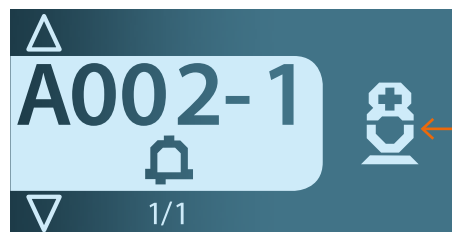


**Presenza infermiera**

- Premere una volta il tasto **10** per attivare il canale audio;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Ripremere una volta il tasto **10** per disattivare il canale audio.

**3. Comunicazione tra due infermiere presenti in camere diverse con più infermiere con presenza in camere diverse**

**(sul display di camera deve esser segnalata la presenza della collega come esempio)**

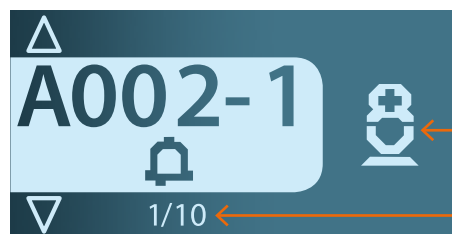

**Presenza infermiera**

**Camere con presenza**

- Selezionare la camera con cui comunicare con i tasti **1-3**;
- Premere una volta il tasto **10** per attivare il canale audio;
- Iniziare la comunicazione dopo l'accensione led bianchi **7** e **10**;
- Ripremere una volta il tasto **10** per disattivare il canale audio.

**COMUNICAZIONE DA CENTRALE DI PRESIDIO ALLA CAMERA CON PRESENZA INFERMIERA**

- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 del REPARTO A e segnala la propria presenza;
- Dalla centrale di presidio premendo il tasto microfono si comunica con la camera presidiata (vivavoce).

**1. La situazione a riposo**




**2. Presenza dell'infermiera nella camera**


**CENTRALE DI PRESIDIO**



**REPARTO A - CAMERA 1**

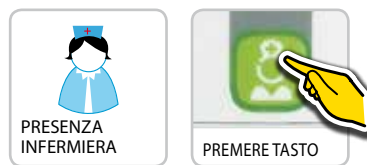

**REPARTO A - CAMERA 2**

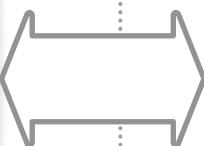

**NOTA:**

La stessa funzione di chiamata è attiva anche con:

- CHIAMATA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI EMERGENZA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI ALLARME + PRESENZA.

**COMUNICAZIONE GENERALE DALLA CAMERA**

- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 del REPARTO A e segnala la propria presenza;
- L'infermiera può inviare una comunicazione a tutte le camere e alle centrali di presidio.


**1. La situazione a riposo (vedi pag. 33 - ESEMPIO 01)**

**2. Presenza dell'infermiera nella camera**

REPARTO A - CAMERA 2

REPARTO A - CAMERA 1

CENTRALE DI PRESIDIO

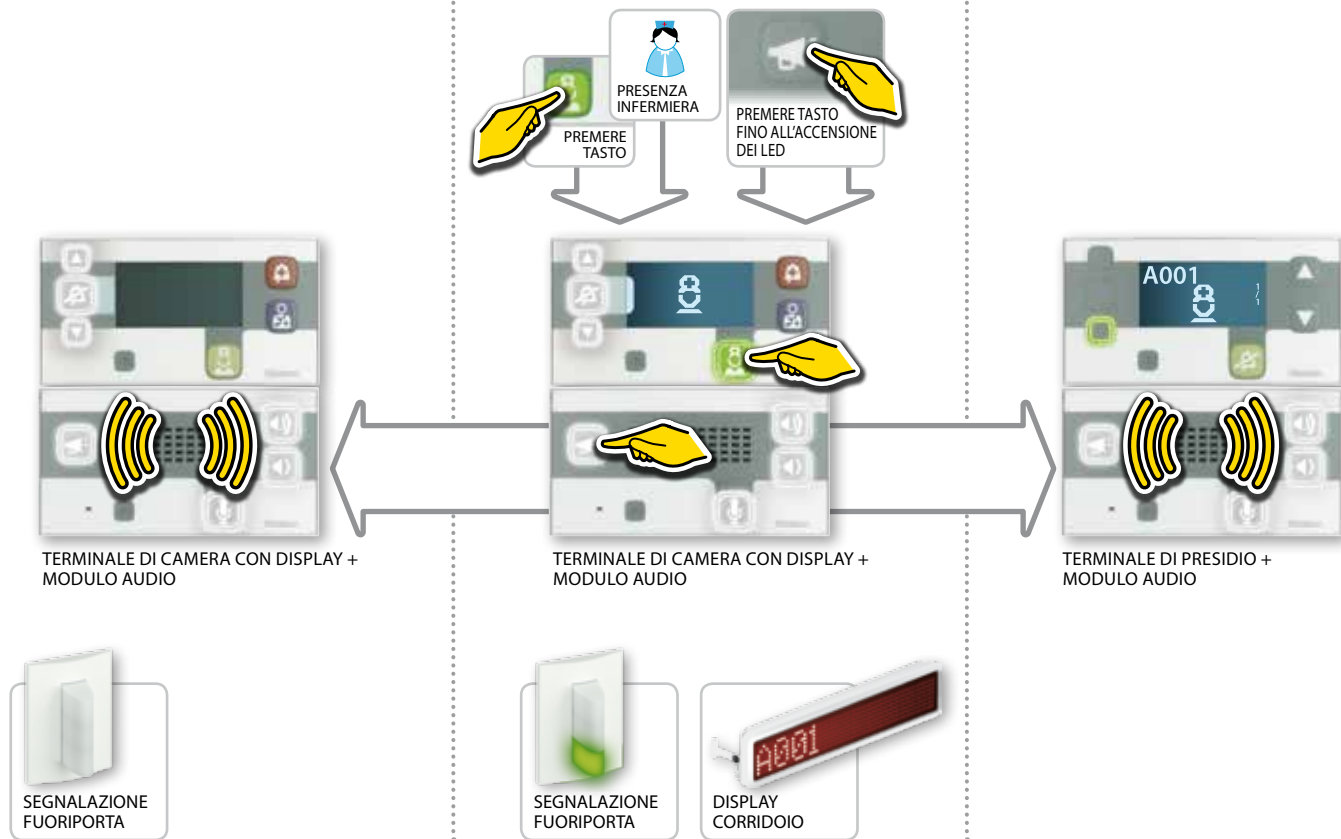

**NOTA:**

La stessa funzione di chiamata è attiva anche con:


- CHIAMATA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI EMERGENZA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI ALLARME + PRESENZA.

**COMUNICAZIONE GENERALE DALLA CENTRALE DI PRESIDIO**

- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 del REPARTO A e segnala la propria presenza;
- Dalla centrale di presidio premendo il tasto di chiamata generale si comunica con tutte le camere e le centrali di presidio.

**1. La situazione a riposo (vedi pag. 33 - ESEMPIO 01)**

**2. Presenza dell'infermiera nella camera**

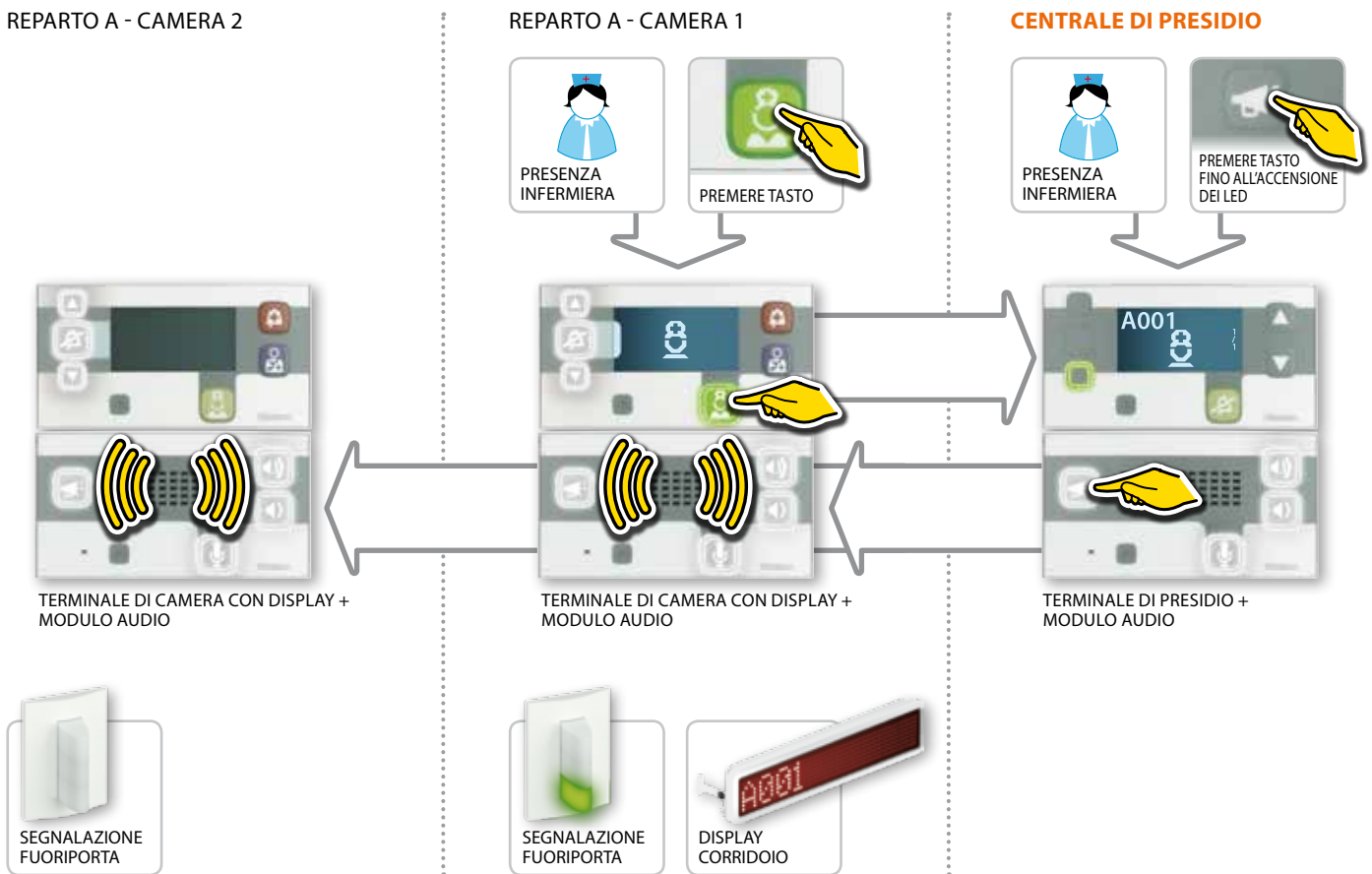

**NOTA:**

La stessa funzione di chiamata è attiva anche con:

- CHIAMATA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI EMERGENZA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI ALLARME + PRESENZA.

**COMUNICAZIONE DALLA PRIMA CAMERA IN PRESENZA ALLA SECONDA CAMERA IN PRESENZA**

- L'infermiera si reca nella CAMERA 1 del REPARTO A e segnala la propria presenza;
- L'infermiera della prima camera in presenza può comunicare con l'altra camera in presenza.


**1. La situazione a riposo (vedi pag. 33 - ESEMPIO 01)**

**2. Presenza dell'infermiera nella camera**

**REPARTO A - CAMERA 1**

**REPARTO A - CAMERA 2**

**CENTRALE DI PRESIDIO**

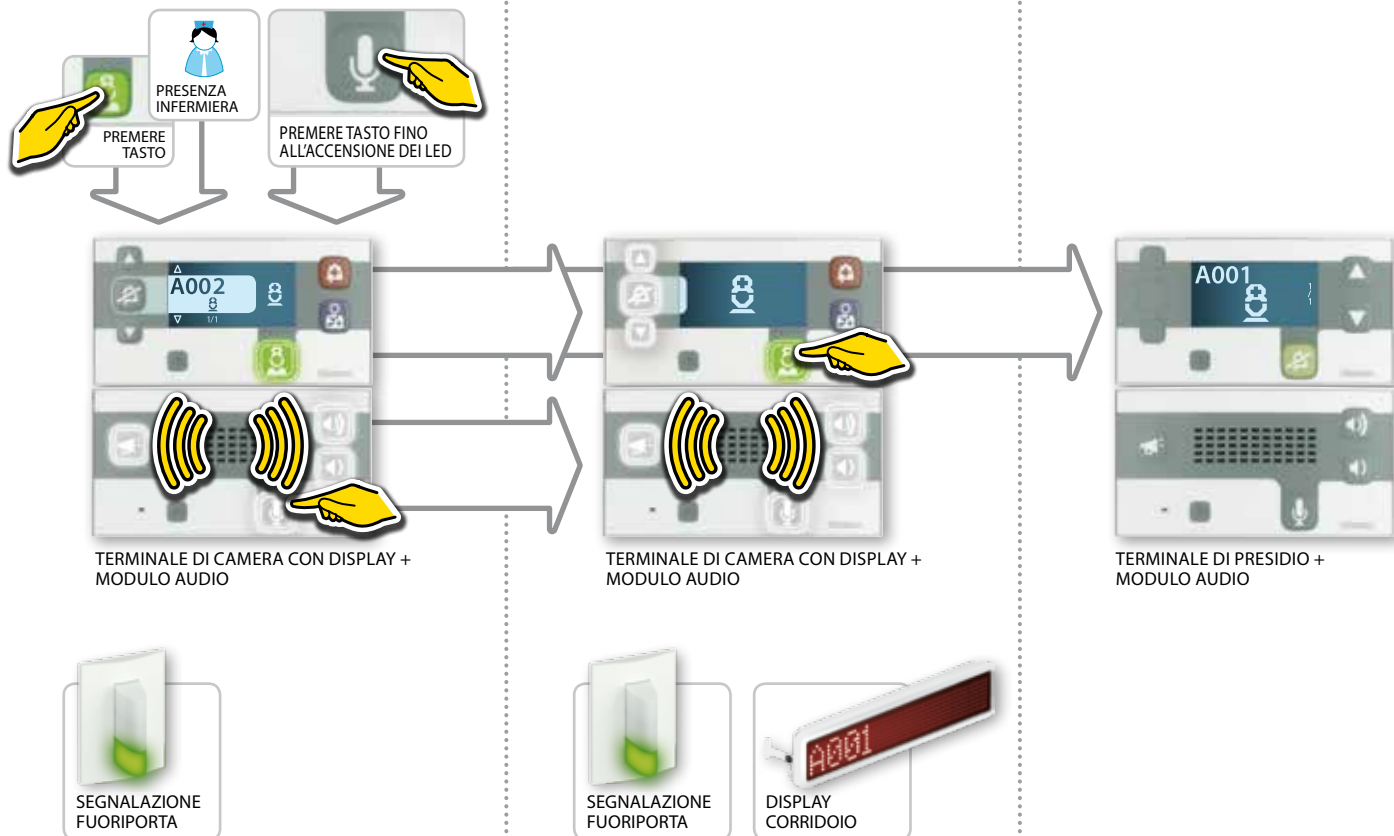


**NOTA:**

La stessa funzione di chiamata è attiva anche con:

- CHIAMATA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI EMERGENZA + PRESENZA;
- CHIAMATA DI ALLARME + PRESENZA.

# UNIONE E SEPARAZIONE DEI REPARTI

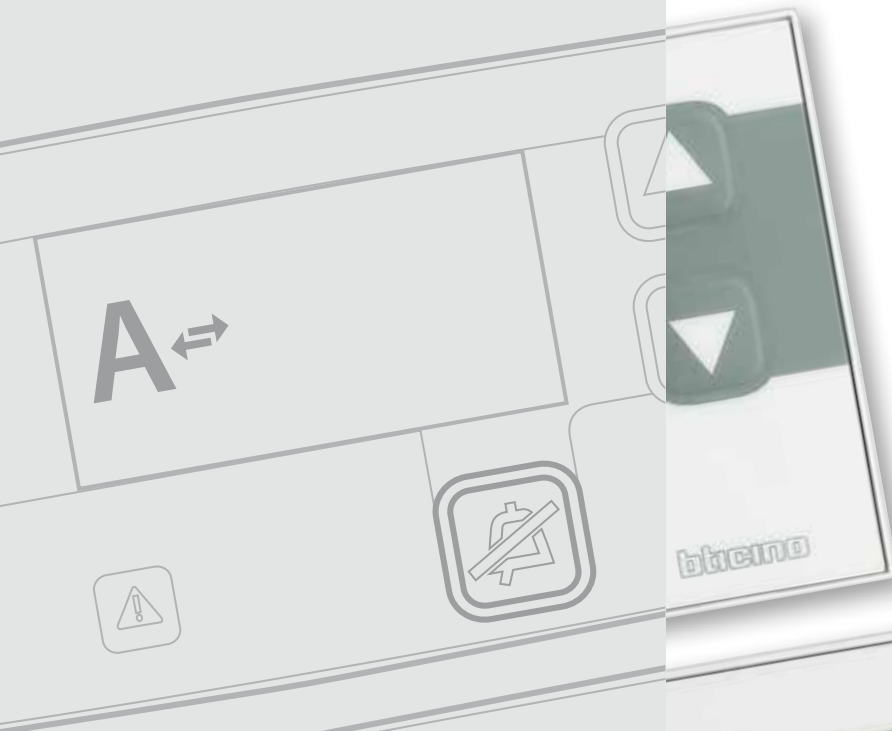

## UNIONE E SEPARAZIONE DEI REPARTI

### Premessa

**Qualora sia richiesto il controllo più reparti (max. 4) dalla centrale di presidio principale di un singolo reparto è necessario unire/separare la gestione dei reparti da monitorare.**

**In fase di primo avviamento dell'impianto**, l'installatore deve necessariamente completare la procedura di "Trova aree" (v. guida per riferimento) per il/i terminali di presidio principale dell'impianto che potranno in seguito gestire l'unione.

Dopo che sul/sui terminali di presidio è stata completata la procedura descritta di ricerca delle aree (ovvero dei reparti dell'impianto), il sistema è predisposto per l'unione dei reparti. L'unione reparti, precedentemente individuati dalla ricerca, potrà poi avvenire su richiesta dell'UTENTE (l'infermiera), mediante apposita procedura descritta in seguito.

Il numero massimo dei reparti sono:

- 10 per impianti con configurazione fisica (aree A-B-C-D-E-F-G-H-I-L);
- 15 per impianti con configurazione avanzata (aree A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q).

**Di seguito sono riportati gli esempi più comuni e più frequenti:**

### ESEMPIO 01

Clinica con 3 reparti **A,B,C** di cui uno hospital day (reparto **C**).

Il presidio che deve sempre operare (giorno/notte) è posto nel reparto **A**; il presidio del reparto **B** è attivo solo durante il giorno.

### ESEMPIO 02

Clinica con 3 reparti **A,B,C**.

Il presidio che deve sempre operare (giorno/notte) è posto nel reparto **A**; I presidi dei reparti **B** e **C** sono attivi solo durante il giorno.

### ESEMPIO 03

Clinica con 3 reparti **A,B,C**.


I presidi di ciascun reparto deve diventare operativo per gli altri in modo alternato in funzione delle turnazioni del personale infermieristico.

### NOTA:

Le identificazioni delle aree (ABC) sono indicative, possono assumere un'identificazione diversa in rapporto alla configurazione dei dispositivi e della modalità di configurazione scelta.



UNIONE REPARTI DAL TERMINALE REPARTO "A" DEL SOLO REPARTO "B"

 In fase installativa si è eseguita la funzione esplora reparti solo dal terminale reparto A in quanto sarà l'unico a gestire l'unione degli altri reparti.

Reparto A



Reparto B



Reparto C





Le ⇌ indicano che il TERMINALE è predisposto per l'associazione dei reparti.

PROCEDURA DI UNIONE DI DUE REPARTI




Unità di presidio a riposo con trasferimento di chiamata disattivato.

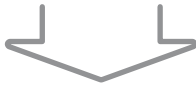



Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "UNIONE".

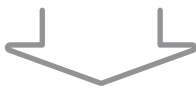


In attesa di selezionare il reparto ...




Selezionare il reparto di provenienza delle chiamate mediante i pulsanti  / 



Il reparto "C" è stato selezionato.

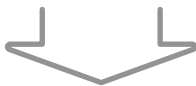

Confermare la scelta premendo il pulsante  sull'unità di presidio.




Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è ATTIVATO.

Continua nella pagina successiva >>

INDICAZIONI SUI TERMINALI AL TERMINE DELL'UNIONE DI "A" E "B"

**Reparto A**

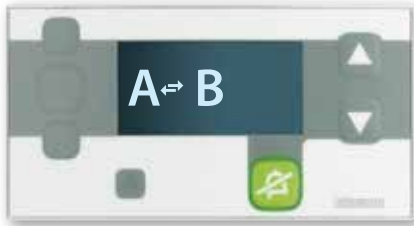

**Reparto B**




**Reparto C**




PROCEDURA DI SEPARAZIONE DI DUE REPARTI




Unità di presidio a riposo con il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è ATTIVATO.

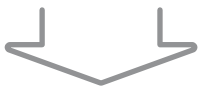



Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "SEPARAZIONE".

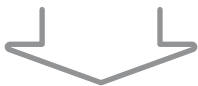


Il terminale è in modalità separazione.




Selezionare il reparto da separare mediante i pulsanti  / .



Il reparto C è stato selezionato.

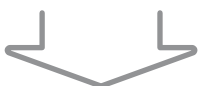


Confermare la scelta premendo il pulsante  per 3 volte.



Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è DISATTIVATO.

UNIONE REPARTI DAL TERMINALE REPARTO "A" DEI REPARTI "B" E "C"

 In fase installativa si è eseguita la funzione esplora reparti solo dal terminale reparto A in quanto sarà l'unico a gestire l'unione degli altri reparti.

Reparto A



Reparto B



Reparto C




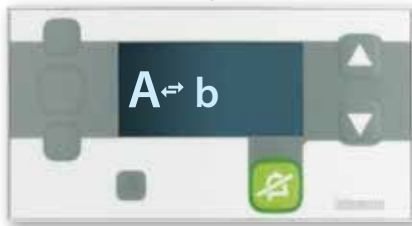
Le ↔ indicano che il TERMINALE è predisposto per l'associazione dei reparti.



PROCEDURA DI UNIONE "A" CON "B" E "C"




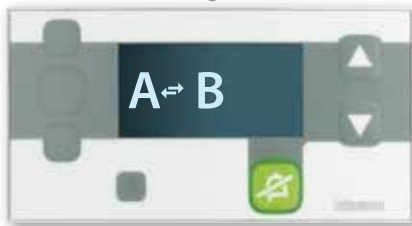
Indicazione di "reparto predisposto" per l'unione con gli altri reparti.

Premere il tasto 




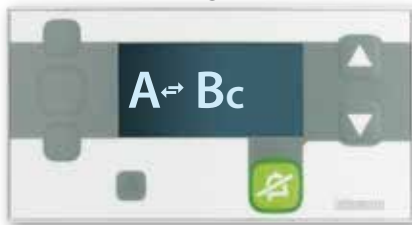
Il sistema propone la prima soluzione; con i tasti  /  selezionare la soluzione desiderata tra quelle proposte.  
Soluzioni proposte: A ↔ b, A ↔ c.


Confermare la scelta del reparto "b" premendo il tasto 



La lettera che indica il reparto da unire, da minuscola diventa maiuscola ad indicare l'avvenuta unione.  
Il reparto B è ora unito con il reparto A.

Premere il tasto 



Il sistema propone la prima soluzione; con i tasti  /  selezionare la soluzione desiderata tra quelle proposte.  
Soluzioni proposte: A ↔ c.

Confermare la scelta del reparto "c" premendo il tasto 



I reparti B e C sono uniti al reparto A.



Continua nella pagina successiva >>

INDICAZIONI SUI TERMINALI AL TERMINE DELL'UNIONE DI "A" E "B" ED "A" E "C"


**Reparto A**

**Reparto B**

**Reparto C**

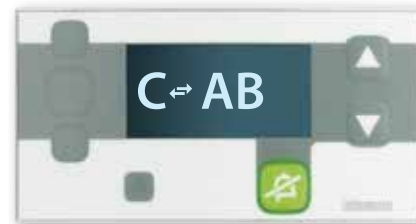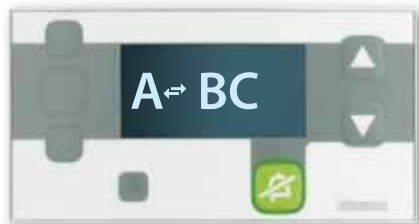




PROCEDURA DI SEPARAZIONE DEI REPARTI "A" E "B" - "C"


 La separazione dei reparti può essere eseguita da entrambi i terminali, è consigliabile sia eseguita dal terminale B o C nel momento in cui sia rientrata l'infermiera di turno.

**Reparto A**

**Reparto B**




**Reparto C**

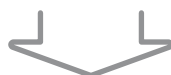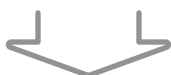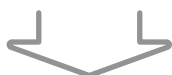


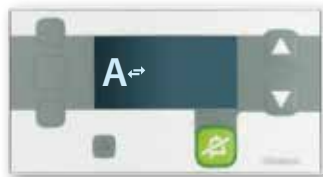
Premere il tasto 



Lampeggiano il simbolo ↔ e le lettere dei reparti uniti.

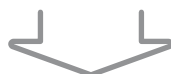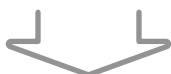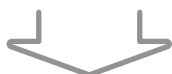

Confermare la scelta premendo il tasto 



Il reparto A è separato da reparto B e C.

Il reparto B è separato dal reparto A e C.

Il reparto C è separato dal reparto A e B.

INDICAZIONI SUI TERMINALI AL TERMINE DELLA SEPARAZIONE DA "A" DI "B" E "C"


**Reparto A**

**Reparto B**

**Reparto C**



UNIONE REPARTI DAL TERMINALE REPARTO "A" O "B" O "C"

 In fase installativa si è eseguita la funzione esplora reparti da tutti i terminali di reparto, sarà possibile gestire l'unione da tutti i reparti.

Reparto A



Reparto B



Reparto C




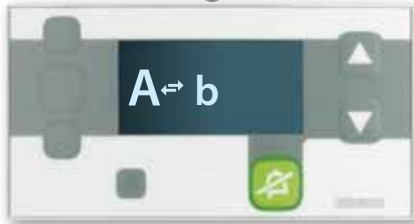
Le ↔ indicano che il TERMINALE è predisposto per l'associazione dei reparti.



PROCEDURA DI UNIONE DA QUALSIASI REPARTO



Indicazione di "reparto predisposto" per l'unione con gli altri reparti (la lettera indica il terminale dal quale si sta operando). Questa operazione deve essere eseguita su tutti gli altri terminali di reparto interessati.

Premere il tasto 




Il sistema propone le soluzioni; con i tasti  /  selezionare la soluzione desiderata tra quelle proposte.  
Soluzioni proposte: A ↔ b, A ↔ c.



Confermare la scelta del reparto "b" premendo il tasto 




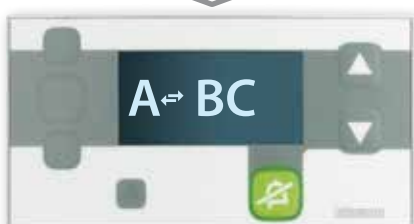
La lettera che indica il reparto da unire, da minuscola diventa maiuscola ad indicare l'avvenuta unione.  
Il reparto B è ora unito con il reparto A.

Premere il tasto 



Con i tasti  /  selezionare la soluzione desiderata tra quelle proposte.  
Soluzioni proposte: A ↔ c.

Confermare la scelta del reparto "c" premendo il tasto 



I reparti B e C sono uniti al reparto A.

Continua nella pagina successiva >>

INDICAZIONI SUI TERMINALI AL TERMINE DELL'UNIONE DI "A" E "B" ED "A" E "C"

**Reparto A**

**Reparto B**

**Reparto C**



PROCEDURA DI SEPARAZIONE DELLE AREE "A" E "B" - "C"







La separazione delle aree può essere eseguita da entrambe i terminali, è consigliabile sia eseguita dal terminale B o C nel momento in cui sia rientrata l'infermiera di turno.

**Reparto A**

**Reparto B**




**Reparto C**

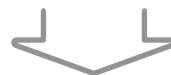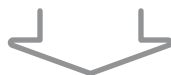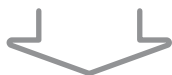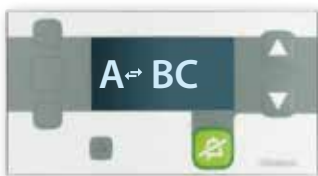

Premere il tasto



Lampeggiano il simbolo ↔ e le lettere.

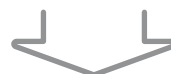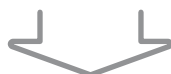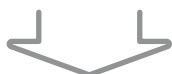

Confermare la scelta premendo il tasto



Il reparto A è separato da reparto B e C.

Il reparto B è separato dal reparto A e C.

Il reparto C è separato dal reparto A e B.

INDICAZIONI SUI TERMINALI AL TERMINE DELLA SEPARAZIONE DA "A" DI "B" E "C"

**Reparto A**

**Reparto B**

**Reparto C**




**ESEMPI**


*ESIGENZA: UNIRE LA GESTIONE DEL REPARTO "B" CON IL REPARTO UNITO "A"+"C" (VEDI ESEMPIO 03)*

In pratica quando l'infermiera del reparto B sta per finire il suo turno e deve unire la gestione del proprio reparto ad un altro (o altri già uniti, come ad esempio i reparti A e C già uniti).




Si parte da una situazione "a riposo" in cui l'infermiera ha davanti a sé il proprio terminale di presidio, ovvero del reparto B di appartenenza.

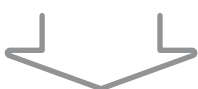
**PROCEDURA**

Premere il tasto  del terminale di presidio del reparto B.



Il sistema propone i reparti già uniti (A-C).  
Selezionare la coppia AC mediante i tasti freccia sul terminale.

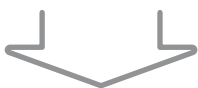

Confermare la scelta del reparto "AC" premendo il tasto 



La lettera che indica il reparto, da minuscola (ac) diventa maiuscola (AC) ad indicare l'avvenuta unione.  
Il reparto B è ora unito con il reparto A C.



**NOTA:** Il sistema "gode della proprietà transitiva" ovvero se unisco un reparto ad un altro già unito, i tre reparti rimarranno uniti tra loro (A+B+C).

## SEPARAZIONE REPARTI

ESIGENZA: SEPARARE LA GESTIONE DEL REPARTO "C" DAL REPARTO "A" (VEDI ESEMPI 02 E 03)



In pratica quando l'infermiera, al mattino, rientra da riposo e vuole tornare a gestire personalmente il proprio reparto C.




Si parte da una situazione "a riposo" in cui l'infermiera ha davanti a se il proprio terminale di presidio, del reparto di appartenenza (ad esempio il terminale del reparto C).

Il reparto C era stato precedentemente unito al reparto A.


### PROCEDURA




Indicazione di area unite (C&A).

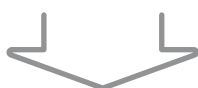

Premere il tasto

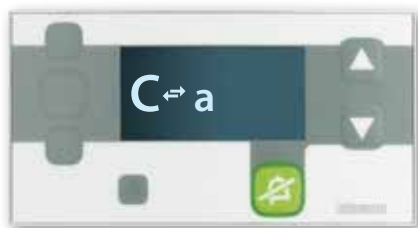

Proposta per separazione.

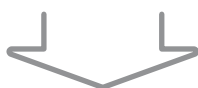

Confermare premendo il tasto



Area separata.

SI freccette per esempio 03

NO freccette per esempio 02



### NOTA: Esempio per la separazione

Ipotizziamo che durante il turno notturno vengano uniti 3 reparti, ad esempio A+B+C.

Quando l'infermiera, al rientro da riposo, vuole tornare a gestire personalmente il proprio reparto (ad esempio il reparto C) basta che effettui la precedente procedura di separazione aree, separando C da A+B.

**La separazione ha SEMPRE effetto esclusivamente dall'area da cui viene effettuata e solamente su quell'area.**

**In pratica, dal terminale del reparto C posso solo separare C dagli altri reparti, ma non posso influire sulla separazione di altri reparti. Ovvero, dal reparto C non è possibile scollegare il reparto B dal reparto A.**



# SEGNALAZIONE GUASTI



**SEGNALAZIONE GUASTI**

**Guasto pulsante di chiamata o stacco perella**



**Guasto tirante bagno**




**Guasto alimentazione ausiliaria**



**Guasto alimentazione BUS di comunicazione**



 **All'accensione della segnalazione gialla chiamare il manutentore**

# QUICK GUIDE

## Indicazioni sul terminale di presidio

Origine delle chiamate:  
Numero letto / Bagno / Allarme biomedico

Pulsanti di navigazione nella lista chiamate

Indicatore numero chiamate (esempio: è visualizzata la chiamata n. 2 su un totale di 3 chiamate)

Pulsante di tacitazione e conferma

Indicazioni sul display	Significato
	Chiamata dal terminale di camera della camera 1
	Letto 1 Chiamata dal letto 1 della camera 1
	Letto 2 Chiamata dal letto 2 della camera 1
	WC Chiamata dal bagno/WC della camera 1
	Allarme da sistema antifuga su uscita controllata 1

La lettera indica il reparto

Indicatore trasferimento chiamata

### ESEMPIO: Unione di 2 reparti

Azione	Indicazioni sul display
	Unità di presidio a riposo con trasferimento di chiamata disattivato
Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "UNIONE"	In attesa di selezionare il reparto ...
Selezionare il reparto di provenienza delle chiamate mediante i pulsanti	Il reparto "C" è stato selezionato
Confermare la scelta premendo il pulsante  sull'unità di presidio	Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è ATTIVATO

bticino

Indicazioni sul display	Significato
	L'infermiera è presente nella camera 1
	L'infermiera ha tacitato la suoneria tramite il pulsante

Indicazioni sul display	Significato
	L'infermiera è presente nella camera 1
	L'infermiera ha richiesto l'assistenza di un'altra infermiera
	L'infermiera è presente nella camera 1
	L'infermiera ha richiesto la presenza del medico
	L'infermiera è presente nel WC della camera 1
	L'infermiera ha richiesto l'assistenza di un'altra infermiera nel WC
	L'infermiera è presente nel WC della camera 1
	L'infermiera ha richiesto la presenza del medico

### Lista reparti

Indicativo    Nome del reparto


### ESEMPIO: Separazione di 2 reparti

Azione	Indicazioni sul display
	Unità di presidio a riposo con il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è ATTIVATO
Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "SEPARAZIONE"	Il terminale è in modalità separazione
Selezionare il reparto da separare mediante i pulsanti	Il reparto C è stato selezionato
Confermare la scelta premendo il pulsante  per 3 volte	Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è DISATTIVATO






## GUIDA RAPIDA - Segnalazioni sul terminale di presidio

Origine delle chiamate:

Numero letto / Bagno / Allarme biomedico

Numero camera

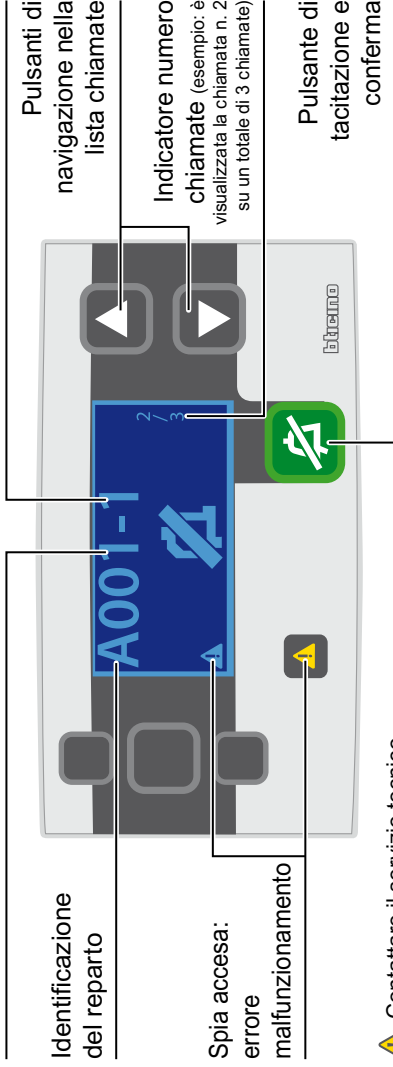

Contattare il servizio tecnico


Indicazioni sul display	Significato
	L'infermiera è presente nella camera 1
	L'infermiera ha tacitato la suoneria tramite il pulsante

Indicazioni sul display	Significato
	Chiamata dal terminale di camera della camera 1
	Letto 1
	Letto 2
	WC


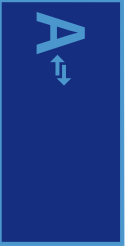





Indicazioni sul display	Significato
	Richiesta infermiera aggiuntiva nella camera 1
	Richiesta medico nella camera 1
	Richiesta infermiera nel WC della camera 1
	Richiesta medico nel WC della camera 1

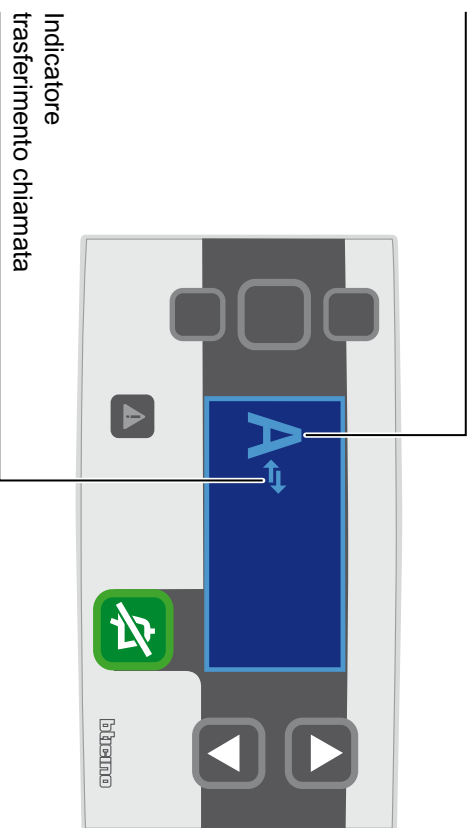	Allarme da apparecchiature biomedicali della camera 1
	Allarme da sistema antifuga su uscita controllata 1

La lettera indica il reparto



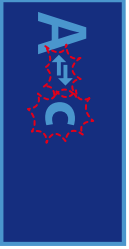







## ESEMPIO: Unione di 2 reparti

Azione	Indicazioni sul display
Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "UNIONE"	 Unità di presidio a riposo con trasferimento di chiamata disattivato
Selezionare il reparto di provenienza delle chiamate mediante i pulsanti  	 Il reparto "C" è stato selezionato
Confermare la scelta premendo il pulsante  sull'unità di presidio	 Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è <b>ATTIVATO</b>

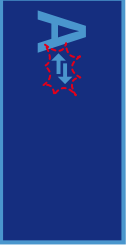Lista reparti	
Indicativo	Nome del reparto
<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	.....
<input type="text"/>	.....

## ESEMPIO: Separazione di 2 reparti

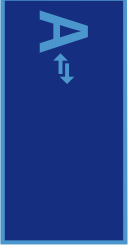Azione	Indicazioni sul display
Unità di presidio a riposo con il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è <b>ATTIVATO</b>	
Premere il pulsante  sull'unità di presidio per entrare in modalità "SEPARAZIONE"	 Il terminale è in modalità separazione
Selezionare il reparto da separare mediante i pulsanti  	 Il reparto C è stato selezionato
Confermare la scelta premendo il pulsante  per 3 volte	 Il trasferimento di chiamata dal reparto C al reparto A è <b>DISATTIVATO</b>



**BTicino SpA**

Viale Borri, 231  
21100 Varese - Italy  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

Servizio clienti

